

一般医療機器


機械器具(65) 歯科用充填器  
歯科用マトリックスウェッジ JMDNコード：16370000

再使用禁止

## ウッドウェッジ

### 【形状・構造及び原理等】

- ①本品の材質は、木である。  
②本品は以下の種類からなる。  
ウッドウェッジ

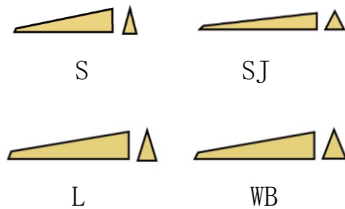

ウッドウェッジ アナトミカル



|   |     |        |
|---|-----|--------|
| * | サイズ | 色      |
|   | S   | ナチュラル  |
|   | M   | イエロー   |
|   | L   | バイオレット |
|   | X L | レッド    |

| 品名      |                        | 包装    |
|---------|------------------------|-------|
| ウッドウェッジ | # S                    | 50 個入 |
| ウッドウェッジ | # S J                  | 50 個入 |
| ウッドウェッジ | # L                    | 50 個入 |
| ウッドウェッジ | # WB                   | 50 個入 |
| ウッドウェッジ | アソート (S, S J, L, WB) 各 | 15 個入 |

|         |                       |       |       |
|---------|-----------------------|-------|-------|
| ウッドウェッジ | アナトミカル                | # S   | 50 個入 |
| ウッドウェッジ | アナトミカル                | # M   | 50 個入 |
| ウッドウェッジ | アナトミカル                | # L   | 50 個入 |
| ウッドウェッジ | アナトミカル                | # X L | 50 個入 |
| ウッドウェッジ | アソート (S, M, L, X L) 各 | 15 個入 |       |

#### ＜原理等＞

本品は、歯の間隙に挿入してわずかに分離させる為の物である。  
ウッドウェッジは、S、S J、L、WB、  
ウッドウェッジ アナトミカルは、S、M、L、X Lの順に  
歯間に挿入する太さが大きくなっていく。

### 【使用目的又は効果】

#### ＜使用目的＞

歯間分離材。

#### ＜効果＞

ウェッジホルダー等を用いて、本品を歯間に輸送・挿入することにより歯間分離が可能である。

### 【使用方法等】

#### ＜使用方法＞

- (1) ウェッジホルダー等を用いて、歯間に対して適当と思われる本品を歯間に挟む。

#### ＜操作方法＞

- (1) 適当なサイズのウェッジを選ぶ。  
(2) ウェッジホルダー等でウェッジを保持する。  
(3) ウェッジを歯間に挿入する。

### 【使用上の注意】

#### ＜使用注意＞

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。  
(2) 製品の仕様は改良のため、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。  
(3) 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。

#### ＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- (1) 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。  
(オートクレーブ可)  
(2) 本品は、必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認し、口腔内を傷つける可能性がある場合には、新しい物と交換すること。  
(3) 本品のご使用の際にはラバーダム防湿の併用をお勧めします。  
(4) 本品の脱落は誤飲等の重大事故につながる危険性が高いため、十分に確認作業を行い注意して取り扱うこと。  
(5) ウェッジ挿入の際は、周辺の粘膜等に十分配慮すること。  
(6) 本品は一回使いきりのため、再使用しないこと。  
(7) 本品は木製のため、薬液は使用しないこと。  
(8) 着色料に対するアレルギーを持つ患者への使用は避けること。  
(9) 歯肉等の損傷を避けるために、使用部位に適したサイズを選択し、無理な装着はしないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### ＜保管方法＞

- (1) 本品は木製ですので、湿度の高い場所に長時間放置すると使用できなくなる恐れがあるため、湿度が低く、清潔な場所に保管すること。  
(2) 滅菌済みのものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり等の損傷等に異常がないか点検すること。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 1、製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624

#### 2、外国製造業者

ウォーターピック インク

(Water Pik, Inc.)

国 名：アメリカ合衆国