

キュータスα

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止。

2. 粘着部を創傷に当てないこと。

【使用目的、効果又は効能】  
創傷面の保護


【形状・構造及び原理等】  
本品は粘着部(不織布製)の中央に吸収性不織布を貼り付け、粘着部を剥離紙で覆い、滅菌バッグに入れてエチレンオキシドガスで滅菌したものです。  
サイズは8種類あります。

【品目仕様等】  
吸水パッドに超吸収繊維を採用しているので、多量の血液や浸出液を吸収し長時間保持します。パッドの表面には非固着性フィルムをラミネートしているので、剥離の際創面が貼り付かず新生組織を傷つけません。素材には通気性に優れたポリエステル不織布と防水効果のあるポリウレタンフィルムを採用しています。また、粘着剤は皮膚への刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用しています。

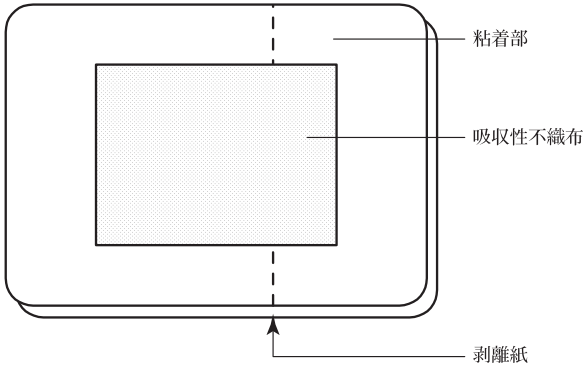

【操作方法又は使用方法等】  
1. 創傷とその周囲を清潔にします。  
2. 創傷に合うサイズを選び、滅菌バッグから取り出して、吸収性不織布に触れないように剥離紙を剥がします。  
3. 吸収性不織布を創傷面に当て周囲の粘着部で固定します。

(断面図)

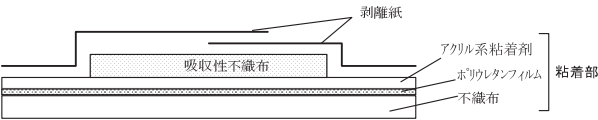

【使用上の注意】  
1. 使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)  
皮膚の非常に弱い患者。  
2. 重要な基本的注意  
・ 滅菌バッグや本品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。  
・ 本品の使用中に発疹、発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が現れた場合には、ただちに使用を中止してください。  
・ 本品使用前に、必要に応じて止血処理等を行ってください。  
・ 創の観察を十分に行い浸出液の量や創の状態に応じ、適切な交換及び処置を行ってください。  
・ 滅菌バッグの開封後は、早急に使用してください。

|     | 吸収性不織布    | 粘着部         |
|-----|-----------|-------------|
| 1 号 | 2.5cm×3cm | 5cm×5cm     |
| 2 号 | 3cm×4cm   | 5cm×7.2cm   |
| 3 号 | 3cm×6cm   | 6cm×10cm    |
| 4 号 | 5cm×7cm   | 10cm×12.5cm |
| 5 号 | 5cm×10cm  | 10cm×16cm   |
| 6 号 | 5cm×15cm  | 10cm×20cm   |
| 7 号 | 5cm×20cm  | 10cm×25cm   |
| 8 号 | 5cm×25cm  | 10cm×30cm   |

### 3. その他の注意事項

- ・粘着部の一部が吸収性不織布まで剥がれた場合は、新しいものに貼り替えてください。
- ・使用中に本品が破損したり、浸出液、血液等が染み出してきた場合は新しいものに貼り替えてください。
- ・本品は滅菌済みで、包装材の破損等がない限り無菌性は保証されていますが、使用時に包装材が破損または汚損している場合には使用しないでください。
- ・本品を再滅菌しないでください。

#### \*\*【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

##### 1. 貯蔵・保管方法

- ・滅菌バッグの破損に注意し、直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。

##### 2. 使用期間

- ・使用期間はバーコードラベルと滅菌バッグに記載されています。使用期限の切れたものは使用しないでください。
- ・使用期間は製造日より3年間です。

#### 【包装】

|    | 枚数 / 箱   |
|----|----------|
| 1号 | 100枚 / 箱 |
| 2号 | 50枚 / 箱  |
| 3号 | 50枚 / 箱  |
| 4号 | 20枚 / 箱  |
| 5号 | 20枚 / 箱  |
| 6号 | 20枚 / 箱  |
| 7号 | 20枚 / 箱  |
| 8号 | 20枚 / 箱  |

#### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の名称：日本シグマックス株式会社

住所：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

電話番号：03-5326-3200

製造業者の名称：タック化成株式会社

住所：〒769-1504 香川県三豊市豊中町上高野七尾4148

お問い合わせは、製造販売業者までお願いします。