

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管  
吸引チューブ 16779000 一般医療機器

## es バリフィットチューブ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

##### 再使用禁止

- ・本品は、未滅菌再使用禁止製品であり、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。


#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、接続用チューブである。90cm 間隔でチューブに膨らみ（バブル）があり切断箇所により接続端がテーパ型あるいはラッパ型になる。\* \* \*  
本品は、径のサイズにより種類がある。  
本品は、未滅菌である。

##### 1. 形状及び寸法

###### 形 状

テーパ型：バブルの隣接部でチューブを切断する

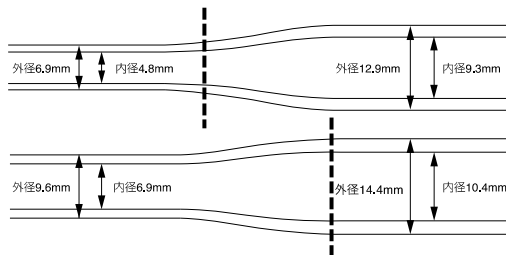

ラッパ型：バブルの中央でチューブを切断する

###### 寸 法

| 種類      | 内径 (mm)  | 外径 (mm)  | 全長 (m) |
|---------|----------|----------|--------|
| 4.8 クリア | 4.8～9.3  | 6.9～12.9 | 30     |
| 7.0 クリア | 6.9～10.4 | 9.6～14.4 |        |

- 本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジイソニル）を使用しています。

#### 【使用目的又は効果】

吸引器と回収容器との接続に用いるプラスチック製のチューブである。

#### 【使用方法等】

1. 接続機器の接続口の径を確認し、適切なチューブを選択する。
2. 必要な箇所にてチューブをカットし、接続機器の接続口に接続する。

#### 【使用上の注意】

1. 万一製品に傷・異物・劣化などを発見した場合は、使用しないこと。
2. 未滅菌品のため、体外での排液・排気カテーテルの延長以外には使用しないこと。
3. 使用前及び使用中は、チューブの圧閉やねじれや折れがないことを確認すること。また、適宜接続状態を確認し、適切な処置を行なうこと。[接続部の漏れ、ゆるみ、外れ、つまりの恐れがある]
4. その他の注意  
使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規則に従って、製品及び包装を廃棄すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。
2. 有効期間（耐用期間）  
製造年月より 3 年 [自己認証（当社データ）による]。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：eastsidemed 株式会社  
東京都文京区本郷3-24-5  
TEL 03-3815-0056 FAX 03-3818-4085