

医療用具 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDM コード 70976000
ディスポーザブル検査・検診用ビニルグローブ(滅菌済)
滅菌ビニル手袋 ノンパウダー

再使用禁止**【禁忌・禁止】**

- ・ 再使用禁止

2. 有効期間

●製造年月日より 3 年[自己認証による]、製造年月日は欄外に記載。

【形状・構造及び原理等】

本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))
を主材料とする滅菌済手袋である。

形状:前指タイプ

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、台紙ごと手袋を取り出す。
2. 台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
●かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。またその後の仕様に関しては慎重を期すこと。

2. 重要な基本的注意

●刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。

●薬品、薬剤等によっては、膨張したり浸透したりする場合があるので、確認の上、使用すること。

●油脂により材質が劣化する場合があるので、確認の上、使用すること。

●本品には、フタル酸系可塑剤を使用しており、特に油性または揮発性の液体に触れると、フタル酸系可塑剤は溶出する恐れがある。

●この手袋の素材であるポリ塩化ビニルは、60℃以上の熱に弱い
ため熱いものに触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
●水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管すること。
●蛍光灯下やオゾンが発生する機会の周辺等に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者

センシンメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3 丁目 23 番 13 号

電話番号: 03-5802-0560

製造業者

キャノパス メディカル サプライ

(Canopus Medical Supply Co.,Ltd.)

国名: 台湾