

2015年01月14日（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

*2013年05月01日（第2版）

医療用品 01 エックス線フィルム
スクリーン型歯科画像診断用X線フィルム JMDN 40977000
一般医療機器

スクリーン型歯科画像診断用X線フィルム

【形状・構造及び原理等】

形状

支持体に銀塩感光材料を塗布したものです。

作動・動作原理

フィルム乳剤中のハロゲン化銀に蛍光板からの蛍光が照射されると、目に見えない像が形成されます。この目に見えない像を現像することにより、目に見える黒い銀画像にすることができ、この黒い銀画像が診断画像となります。

【使用目的又は効果】

特に歯科X線装置で使用するためにサイズを定めて設計したスクリーン型X線フィルムをいう。主に増感紙から発せられた光線の波長に高い感受性を示すように設計されている。

【使用方法等】

フィルムをX線フィルムカセットに装填し、X線撮影を行った後、現像処理を行う。
詳細は設置要項及び取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1.適切な安全光の下で開封すること。
- 2.開封後はなるべく早めに使用すること。又、遮光のため、内袋に入れたまま保管すること。
- 3.局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしないこと。
- 4.フィルムが接着するような極度な高温下での取扱いは避けること。
- 5.静電気が発生するような極度な低温下での取扱いは避けること。
- 6.濡れた手による取扱いは避けること。
- 7.二重露光は避けること。
- 8.使用目的以外には使わないこと。特にスポットライトやOHPを使用する場合には、注意すること。
- 9.長時間高温下での取扱いは避けること。

その他の注意

廃棄する場合は、産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

フィルムは直射日光を避けて、放射線やX線及び有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けない低温・低湿の場所に保管してください。推奨温度・湿度は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

有効期間

有効期間（使用期限）は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：ケアストリームヘルス株式会社
*住所：〒135-0041 東京都江東区冬木1-1-7号
*電話：03-5646-2500（代）

製造業者名：ケアストリームヘルスインコーポレーテッド
Carestream Health, Inc.
アメリカ合衆国

製造業者名：ソロシオーネメディカスエシポルタシオン
Soluciones Medicas Exportacion S. de R. L. de C.V.
メキシコ合衆国