

2015年01月14日（第3版）（新記載要領に基づく改訂）  
\*2013年05月01日（第2版）

医療用品 01 エックス線フィルム  
ノンスクリーン型歯科画像診断用X線フィルム JMDN 40978000  
一般医療機器

## ノンスクリーン型歯科画像診断用X線フィルム

### 【形状・構造及び原理等】

#### 形状

支持体に銀塩感光材料を塗布したものです。フィルムが袋（パッケージ）に入っています。

#### 作動・動作原理

フィルム乳剤中のハロゲン化銀にX線が照射されると、目に見えない像が形成されます。この目に見えない像を現像することにより、目に見える黒い銀画像にすることができ、この黒い銀画像が診断画像となります。

### 【使用目的又は効果】

特に歯科X線装置で使用するためにサイズを定めて設計したノンスクリーン型X線フィルムをいう。  
X線に直接露光させるように設計されており、増感紙から発せられた可視光への感光性は比較的弱い。

### 【使用方法等】

フィルムを口腔内に挿入し、X線で撮影を行った後、現像処理を行う。  
詳細は設置要項及び取扱説明書を参照してください。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

- 1.適切な安全光の下で開封すること。
- 2.開封後はなるべく早めに使用すること。又、遮光のため、内袋に入れたまま保管すること。
- 3.局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしないこと。
- 4.フィルムが接着するような極度な高温下での取扱いは避けること。
- 5.静電気が発生するような極度な低温下での取扱いは避けること。
- 6.濡れた手による取扱いは避けること。
- 7.二重露光は避けること。
- 8.使用目的以外には使わないこと。特にスポットライトやOHPを使用する場合には、注意すること。
- 9.長時間高温下での取扱いは避けること。

#### その他の注意

廃棄する場合は、産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

フィルムは直射日光を避けて、放射線やX線及び有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けない低温・低湿の場所に保管してください。推奨温度・湿度は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

#### 有効期間

有効期間（使用期限）は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：ケアストリームヘルス株式会社  
\*住所：〒135-0041 東京都江東区冬木1-1-7号  
\*電話：03-5646-2500（代）

製造業者名：ケアストリームヘルスインコーポレーテッド  
Carestream Health, Inc.  
アメリカ合衆国

製造業者名：ソロシオーネメディカスエシポルタシオン  
Soluciones Medicas Exportacion S. de R. L. de C.V.  
メキシコ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください。