

***2023 年 8 月（第 4 版）
**2021 年 10 月（第 3 版）
*2018 年 2 月（第 2 版）

医療機器認証番号：13B2X10091000004

* 機械器具 (32) 医療用吸引器

* 一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ（38749000）

吸引チップセット

【警告】

- 初めての使用や長期間保管後の使用のときは、使用前に清掃・消毒をすること。[交差感染]
- 使用後は、使用品を清掃・消毒をすること。[交差感染]

【禁忌・禁止】

併用禁忌
本品に取り付ける吸引器は、以下の製品以外を使用しないこと。
・販売名：ELENOA エレノア
・一般的名称：電動式可搬型吸引器
・認証番号：227AKBZX00011000
*** 製造販売業者：株式会社八森電子デバイス

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 併用医療機器：ELENOA エレノアの添付文書も併せて参照すること。
 - 本書に記載されている以外の方法で使用しないこと。[予測できない動作をする恐れがある]

【保管方法及び有効期間】

- 水のかからない場所、高温・多湿でない場所。
- 直射日光、ほこり、塩分、硫黄分などの化学薬品を含んだ空気・ガスなどにより悪影響の生じる恐れのない場所。
- 洗浄・消毒した構成品は、十分な水洗と速やかな乾燥をさせてから保管すること。
- 振動・衝撃などのない場所。

【保守・点検に係る事項】

- 使用者による保守点検事項
- 割れ、ひび、バリや突起物の怪我のもとになる欠点の有無を確認する。
 - 汚れ、傷の有無や使用頻度に応じ、適切に交換する。

清掃・消毒

構成品	清掃	消毒
吸引チップ（小）	浄水で希釈した中性洗剤を含ませ拭く	次亜塩素酸ナトリウムを含ませ拭く
吸引チップ（大）	浄水で希釈した中性洗剤を含ませ拭く	次亜塩素酸ナトリウムを含ませ拭く
コネクター	浄水で希釈した中性洗剤を含ませ拭く	次亜塩素酸ナトリウムを含ませ拭く

*※本体を滅菌しないこと。[高温・ガス・液体により故障の恐れ]

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等

*** 製造販売業者：株式会社八森電子デバイス
秋田県山本郡八峰町八森字家ノ上 166 番地の 2
TEL：0185-77-3383 FAX：0185-77-3788

【形状・構造及び原理】

1. 外観図・寸法（mm）

吸引チップ（小）




外径:14.5 長さ:25
先端内径:2.7

吸引チップ（大）



外径:14.5 長さ:25
先端内径:3.7

コネクター

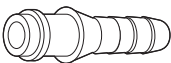

外径:13 長さ:43

**2. 構成

下記の構成から選択できる。

(1) 吸引チップセット（小）

名称	個数
吸引チップ（小）	2
コネクター	2

(2) 吸引チップセット（大）

名称	個数
吸引チップ（大）	2
コネクター	2

3. 原材料

吸引チップ：シリコンゴム
コネクター：ポリカーボネート樹脂

【使用目的又は効果】

手術又は治療時に吸引器具に接続し、吸引を調節又は指示する器具をいう。
本品は汎用吸引チップで、再使用可能である。

【使用方法】


- 吸引ボトルに接続された、吸引ホースの先端に装着し、患者の鼻腔から鼻水等の体液を吸引ボトルに吸引する。

**2. 使用前準備

- 吸引ホースの先端に、コネクター、吸引チップを取り付ける。
- 吸引ホースの片端を本体のホース接続口へ接続する。
- 吸引器の吸引圧調整ツマミを回し、圧力計が必要な圧力となるように調整する。
- 吸引器本体の電源を入れる。
- 別に用意した清潔な浄水又は精製水などに吸引チップ先端を入れ、吸引チップを濡らす。

3. 吸引

- 吸引チップの先端を患者の鼻腔に挿入し、鼻水等の体液を吸引する。

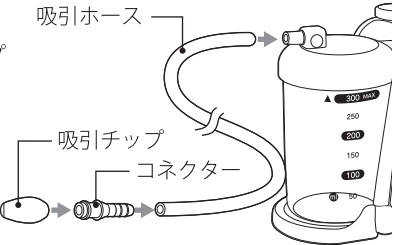

販売名：ELENOA エレノアの取扱説明書を必ず参照ください