

機械器具 32 医療用吸引器

一般的名称: 再使用可能な汎用吸引チップ (JMDN コード: 38749000)

吸引ノズルセット

【警告】

- 本製品および各部品は、必ずお子さまの手の届かないところに保管してください。【自分で作動させようとした場合、誤飲やケガなど思わぬ事故の原因となります。】万一、誤飲した場合は、ただちに医師に相談してください。
- お子さまに鼻の病気がある場合には、本製品を使用する前に医師に相談してから使用してください。
- 使用中に出血したり、お子さまが痛がる場合には、すぐに使用をやめ、ただちに医師に相談してください。【鼻孔内の粘膜を痛めたり鼻腔炎をおこします。】
- 複数のかたが使用する場合は、その都度、吸引ノズルを新しいものと交換するか、洗浄し、消毒または除菌してから使用してください。【感染症の危険があります。】
- 本体から煙が出たり、異臭、異音がする場合は、すぐに使用を中止してコンシューマープラザまでお問い合わせください。
- 分解、修理、改造は行わないでください。

【禁忌・禁止】

<使用方法>


本書に記載されている使用目的以外で使用しないでください。

<併用医療機器>

- 1) MRI 検査を行う際は本品を検査室に持ち込まないこと。
【MR 装置への吸着や、火傷等のおそれがあるため。】
- 2) 高気圧酸素治療装置に本品を持ち込まないこと。
【誤作動や破損、爆発のおそれがあるため。】

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・型式

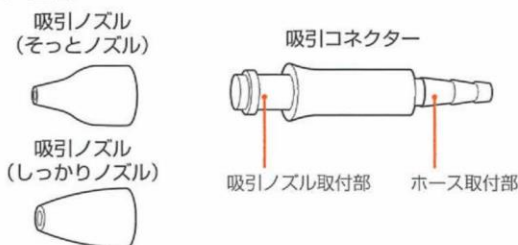

2. 原材料

吸引ノズル: シリコーンゴム

吸引コネクター: ABS 樹脂

【使用目的又は効果】

吸引器具に接続し、吸引を支持する器具である。本品は汎用吸引ノズルで再使用可能である。

【性能及び安全性に関する規格】


最大吸引圧力: $-80\text{kPa} \pm 10\%$

【使用方法等】

1. 使用準備

本品の構成部品を目的に合わせて組み合わせる。

- 1) 吸引ノズルを吸引コネクターに取り付け、吸引コネクターのホース取付部を吸引ホースの片端に差し込む。
- 2) 吸引ホースのもう片端を、吸引ボトルキャップのホース接続部に差し込む。

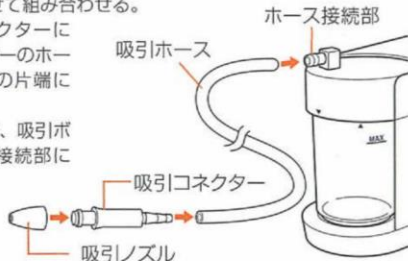

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

2. 吸引

吸引器を使用する場合

- 1) 吸引器本体の吸引圧ダイヤルを回す。
- 2) 吸引器本体の電源スイッチを ON にする。(吸引ポンプが作動)
- 3) 別に用意した清潔な水などに吸引ノズルを入れ、吸引ノズルを濡らす。
- 4) 吸引ノズルをお子さまの鼻孔に挿入し、鼻水を吸引する。

3. 吸引物の捨てかた

- 1) 吸引器本体の電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜く。
- 2) 吸引ホースをホース接続口からはずし、吸引ボトルを本体から取りはずす。
- 3) 吸引ボトルキャップを回してはずす。
- 4) 吸引ボトル内の吸引物を捨てる。

4. 組み合わせて使用可能な医療機器

本セットは「電動鼻吸引器 S-80」(認証番号: 229AFBZX00095000)にのみ使用できる。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 併用医療機器: 電動鼻吸引器 S-80 の添付文書も併せて参照すること。
- 本書に記載されている以外の方法で使用しないこと。(予期できない動作をするおそれがある)

【保管方法及び有効期間等】

- 水のかからない場所、気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などの化学薬品を含んだ空気・ガスなどにより悪影響の生じるおそれのない場所に設置、保管すること。
- 洗浄・消毒した構成部品は、十分な水洗いと速やかな乾燥をさせてから保管すること。

【保守・点検に係る事項】

清掃・消毒

機械品		清掃	消毒
吸引ノズル	内部	中性洗剤が希釈された清潔な水溶液を内部に通す。	次亜塩素酸ナトリウム
	外部	中性洗剤が希釈された清潔な水溶液を含ませ拭く。	次亜塩素酸ナトリウムを含ませ拭く。
吸引コネクター		中性洗剤が希釈された清潔な水を含ませ拭く。	取扱説明書をご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: 株式会社 TR アンド K
〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-9 NK 第 7 ビル 501
TEL: 03-6457-8751 FAX: 03-6457-8752

製造業者: 株式会社 八森電子デバイス
〒018-2643 秋田県山本郡八峰町八森字家の上 166-2

発売元: コンビ株式会社
コンシューマープラザ (Customer Service Center)
住所: 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田 271
TEL: 048-797-1000 FAX: 048-798-6109
受付時間: 9:30 ~ 17:00 (日祝日、年末年始を除く)