

医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000
テンピークス グレイシアゼロ ニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

(概要)

本品はニトリルゴム製で副材料に打粉を含まないパウダーフリーの使い捨て検査・検診用手袋である

(形状・構造)

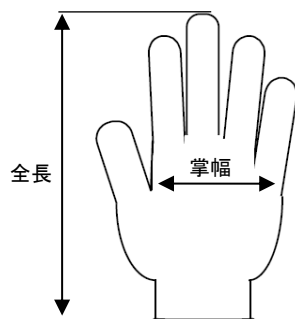

サイズ	掌幅	全長
X S	70～79	240 以上
S	80～89	
M	90～99	
L	100～109	

(単位: mm)

(原理)

治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合に、主に使用者の手に装着することにより、本品が防護壁となり患者及び使用者を交差感染から守る。

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して着用する。

【使用上の注意】

1) 使用注意

1. 本品はディスポーザブル製品であるので再使用は行わないこと。
2. 開封後の箱は直射日光や強い人工光を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
3. 本品を強い化学薬品に対し長時間直接使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

1. 万一、装が破損、汚損している場合や、製品に破損やピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
2. 包装を封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して、医療廃棄物として適切に処分すること。
3. 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがある

ので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1) 貯蔵・保存方法

水濡れに注意し、直射日光、オゾン、高温多湿を避けて保管すること。

2) 使用期限

製造後3年〔自己認証(当社データ)による〕

使用の期限は包装に記載する。

【包装】

2～500枚/パック

入数は、各包装材に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

株式会社モレーンコーポレーション

東京都中野区東中野五丁目1番1号 ユニゾンモール

TEL:03-5338-3911

(製造業者)

TOP GLOVE SDN.BHD.Factory25 (マレーシア)

GMP Medicare Sdn,Bhd .Factory F25 (マレーシア)

Wear Safe(Malaysia)Sdn.Bhd. (マレーシア) *