

医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000
テンピークス グレイシアゼロ ニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

（概要）

本品はニトリルゴム製で副材料に打粉を含まないパウダーフリーの使い捨て検査・検診用手袋である

（形状・構造）

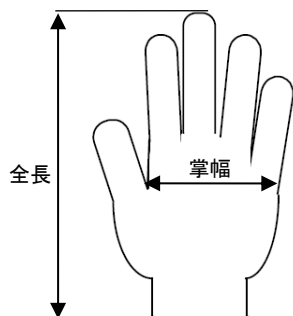

サイズ	掌幅	全長
X S	*71～80	240 以上
S	*81～90	
M	*92～102	
L	*103～113	

（単位：mm）

（原理）

治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合に、主に使用者の手に装着することにより、本品が防護壁となり患者及び使用者を交差感染から守る。

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して着用する。

【使用上の注意】

- 1) **使用注意**
 1. 本品はディスポーザブル製品であるので再使用は行わないこと。
 2. 開封後の箱は直射日光や強い人工光を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
 3. 本品を強い化学薬品に対し長時間直接使用しないこと。
- 2) **重要な基本的注意**
 1. 万一、装が破損、汚損している場合や、製品に破損やピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
 2. 包装を封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して、医療廃棄物として適切に処分すること。
 3. 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1) 貯蔵・保存方法

水濡れに注意し、直射日光、オゾン、高温多湿を避けて保管すること。

2) 使用期限

製造後5ヵ年〔自己認証（当社データ）による〕
使用の期限は包装に記載する。

【包装】

2～500 枚／パック
入数は、各包装材に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

（製造販売業者）

株式会社モレーンコーポレーション
東京都中野区東中野五丁目1番1号 ユニゾンモール
TEL:03-5338-3911

（製造業者）

Hartalega NGC Sdn.Bhd.（マレーシア）