

機械器具 11 放射線障害防護用具
一般医療機器 放射線防護用手袋 (JMDN38364000)

Uniray グローブ

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 天然ゴムによるアナフィラキシーショック症状の既往歴がある医療関係者及び患者に使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

薄い1枚の鉛又は鉛と同等の材料を覆う耐液体性の外部カバー又は天然ゴムで構成され、指及び手の裏表へ達する全方向からの放射線を保護するよう形成されている。
一部の手袋は液状の放射性物質や体液から保護するための追加的な物理的障壁を有している

【使用目的又は効果等】

術者や他の要員の手の全体を診断及び治療措置に関連した一次放射線や散乱放射線による不必要な被曝から保護するために使用する。

【使用方法等】

本品の着用は使用者の身体の大きさに適合するものを使用すること。

【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- 1) この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- 2) 天然ゴムと接触する機会が多くなると天然ゴムアレルギー発症のリスクが高くなると考えられるため、使用に際しては十分に注意すること。
- 3) 製品本体の特性状、鋭利なものに接触すると破れたり、穴があくことがあるため、使用前に損傷やピンホールがないことを十分に確認し使用すること。
- 4) 管電圧 150kV 以下のX線で診療を行う場合に散乱線からの被ばく量を低減させることを目的としており、一次放射線（直接線）などの保護には使用しないこと

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

直射日光が当たる場所や高温多湿やほこりの多い場所は避けて保管すること。

(有効期間)

単回使用

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：Jpi ジャパン株式会社
電話番号：03-5804-6388

製造業者：Uniray Medical LLP (インド)