

機械器具 32 医療用吸引器  
一般医療機器 吸引器用キャニスタ (JMDNコード:34858000)

再使用禁止


販売名：ポリプトラップ トレッタ

**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【形状、構造及び原理等】**

1. 各部の名称
2. 仕様

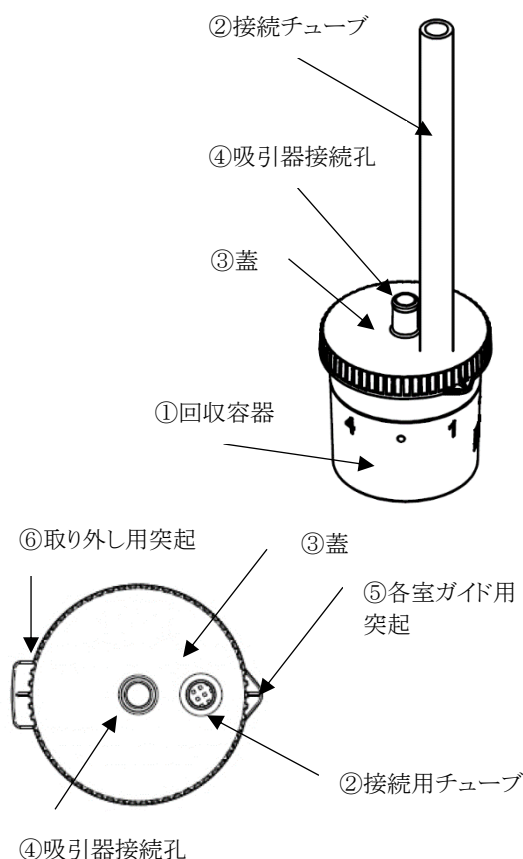

| 項目           | 寸法(±10%)      |
|--------------|---------------|
| 蓋(突起間含む)     | 64 mm         |
| 蓋(突起含まない)    | 56.5 mm       |
| 回収容器(蓋を含まない) | 52 mm         |
| 回収容器外径       | 53 mm         |
| 吸引器用接続孔外径/内径 | 8.9 mm / 6 mm |
| 接続チューブ外径/内径  | 11 mm / 7 mm  |

3. 主な原材料

ポリカーボネート、塩化ビニル、中密度ポリエチレン

**【使用目的又は効果】**

体液の回収のため吸引器とともに使用するキャニスタをいう。本品は単回使用である。

**【使用方法等】**

- ① 本品の蓋にある吸引器接続孔を、吸引器につながるチューブにしっかりと接続する。
- ② 本品の接続チューブを、内視鏡の吸引口金にしっかりと接続する。
- ③ 本品の蓋を回転させて、通常の吸引(ポリープを回収しない時)の場合は、各室ガイド用突起を回収容器に印字されている「●」に合わせる。
- ④ ポリープを回収するときは、本品の蓋を回転させて、各室ガイド用突起を「1」に合わせて吸引し、ポリープを回収する。
- ⑤ ポリープが「1」のチャンバー内に回収されたら、再び蓋を回転させて各室ガイド用突起を回収容器に印字されている「●」に合わせる(通常吸引)。
- ⑥ 必要に応じて、追加のポリープを回収する場合は、④の手順を繰り返し行い、チャンバー位置を「2」、「3」、「4」に合わせて吸引する。
- ⑦ ポリープの回収が終了したら、本品の接続チューブを内視鏡の吸引口金から外し、吸引器につながるチューブを本品の蓋にある吸引器接続孔から外す。
- ⑧ 本品の接続チューブ先端を、本品の蓋の吸引器接続孔に接続させる。
- ⑨ 使用後は、適切な方法で廃棄すること。

**【使用上の注意】**

- ・ 本品に接続されている接続用チューブを取り外さないでください。[蓋が破損し、回収物を取り出す際に蓋の破片等が混入するおそれがある]
- ・ 本品を使用する際は、手袋、保護メガネ、ガウンなどを着用してください。[交差汚染や使用者がけがするおそれがある]

**【保管方法及び有効期限等】**

<保管方法>

高温、多湿、直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。

**【包装】**

1 個入/1 包装

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者： 日本アッシュ株式会社  
住所： 東京都八王子市大和田町 2-7-7  
電話番号： 042-648-5350  
製造業者： Diversatek Vietnam Co., Ltd  
国名： ベトナム