

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN16189000

C S C ワックスディスク

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャスティングワックスとして使用する。

【形状・構造】

サイズ	色調
φ 98×10mm	緑色
φ 98×12mm	
φ 98×14mm	
φ 98×16mm	
φ 98×18mm	
φ 98×20mm	
φ 98×22mm	
φ 98×25mm	



成分

パラフィンワックス、着色染料

原理

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットにて切削加工を行い、歯科鑄造物のろう型に用いる。

【使用方法】

・使用する機械

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

・使用方法

本製品をCAD/CAM加工機に装着し、切削加工を行う。
切削加工後、通法に従い修正、埋没、鑄造を行う。

【操作方法】

詳細な使用方法については、機器に付属の取扱説明書等を参照すること。

- (1) 機器の取扱説明書に従い、本材を機器本体に取り付ける
- (2) 適切なプログラミングで切削を行う

【使用上の注意】

- (1) 本材は、過度の加熱で shouldn't すること
- (2) 本材は、過熱を要するので使用の際は火傷に注意すること
- (3) 再熔解してして使用しないこと

【保管方法】

- ・高温、多湿の場所を避けて保管すること
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること