

2021年6月10日

製造販売届出番号13B3X00065B00002

J M D N :31776000

一般医療器

類別 機械器具(25)医療用鏡

一般的名称 歯鏡

販売名 歯鏡


文書番号A-10

【形状・構造など】

本品はミラー部、柄部、から成る(右記を参照)

1. ミラー、鏡面とステンレス鋼
2. 柄、ステンレス鋼

形状について、
本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号等については包装表示ラベルに記載されているので確認する事。

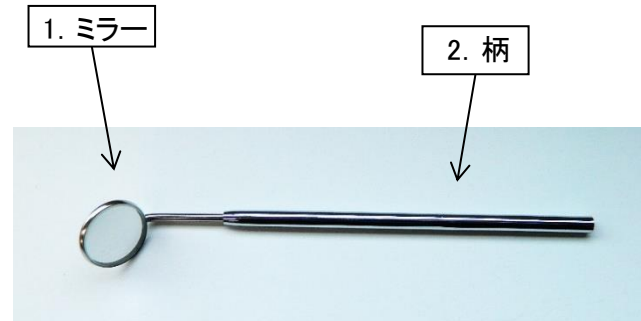

代表図

【使用目的又は効果】

口腔内での診査

【使用方法等】

柄を軽くもち、口腔内で目的部分を観察する。

【使用上の注意】

- 1) 本品は未滅菌の為、使用前に必ず、洗浄、滅菌を施すこと。
- 2) 使用する前にミラー、柄など各部が正常であることを確認して使用のこと。
- 3) 塩素系、ヨウ素系の消毒剤が付着した時は水洗いして下さい。
- 4) 歯磨き粉(金属磨き製品)等の使用は禁止。

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管
室内(常温)にてケース等に入れて保管する。
2. 使用期間
3年間(自己認証)

【保守・点検に関わる事項】

- 1) 洗浄後は直ちに乾燥すること。
- 2) 本品を腐食させる恐れがある、漂白剤、強アルカリ、消毒液は使用を避けること。
金属たわし、クレンザー等は使用しないこと。
- 3) ミラー部の剥がれ、傷がないか充分点検を行う。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社(製造販売業者)
〒111-0042
東京都台東区寿1-11-11 杉山ビル
TEL: 03-5830-3495 FAX: 03-5830-3496