

器 12 理学療法用機械器具 37240010

一般医療機器 温熱用パック

モイストヒートパック

【禁忌・禁止】

以下の症状を示す人、又は診断を受けた人への使用はやめること。

- ① 急性の炎症、悪性腫瘍・出血している部位、出血傾向の強いとき、細菌感染による化膿性疾患、知覚障害のある部位
- ② その他医師が不適当と判断した人

【形状・構造及び原理等】 ※※

製品名	スタンダード	フェイシャルラップ	ネックラップ
製品番号	BHC34110	BHC34311	BHC34320
サイズ	約23x30cm	約19x28cm	約20x56cm
重量	約1100g	約515g	約830g
目安加熱時間	約2分半	約1分半	約2分半
限度加熱時間	3分	約2分	3分
製品名	バックラップ	リストラップ	ジョイントラップ
製品番号	BHC34340	BHC34520	BHC34530
サイズ	約35x18cm	約12x12cm	約17x17cm
重量	約950g	約380g	約880g
目安加熱時間	約2分半	約1分半	約2分半
限度加熱時間	3分	2分	3分

(注1: サイズ・重量は±10%を許容範囲とする)
(注2: 電子レンジ加熱目安時間(500W /600Wレンジの場合)
(注3: 電子レンジが700W-1000Wの場合は1分ー1分半程度加熱時間を減らすこと)

- 1) 機器構成: 本体
- 2) 組 成:
 本体中味: メディビーズ(特殊保温湿材)
- 3) 形 状: 上記表サイズ・重量の通り

【使用目的又は効果】 温熱効果

【使用方法等】

- 1) 本体を電子レンジのレンジ機能以外で加熱しないこと。
 - ① 高周波出力500W～600Wのものを標準モードで使用する。
 - ② 加熱時間は必ず手動設定する。
 - ③ パックはターンテーブルもしくは陶製の皿の上にのせて利用する。
 - ④ レンジ庫内は汚れ、油かす等のないよう清潔にする。
- 2) 加熱について
 - ① 初回は使用説明書に記載の加熱時間の半分程度で加熱し、温まりの程度を計りながら、試すこと。
 - ② 使用説明書に記載の加熱時間を目安とし、加熱超過とにならないように気をつけること。
 - ③ 1回合計加熱時間限度は使用説明書に記載の各モデルの合計加熱時間限度を超えないようにすること。
 - ④ 電子レンジ加熱目安時間
 ※上記表を電子レンジ加熱目安時間を参照のこと。
 - ⑤ 本体のみを加熱すること。
 - ⑥ 加熱し過ぎて熱くなったら、少し冷ましてから、レンジから取り出すこと。

【使用上の注意】

- 1) 電子レンジ庫内を清潔にする。
 パック表面に異物が付着していないことを確認すること。庫内のあぶらや食物かすなどがパックに付着し、パックを焼いてしまうことがある。
- 2) 加熱超過しない。
 加熱超過するとパックを破損したり、パック布地が焦げたりすることがある。また短時間に連続加熱すると加熱超過の時と同じことが起こる場合がある。これはメディビーズが蓄えていた水分が消失してしまい素材自身が焼結状態となるためである。
- 3) 連続使用しない。
 一度使用したら最低2時間位放置する。パックは一度レンジ加熱すると、殆どの水分がメディビーズから放出されるので、短時間に連続加熱すると十分な湿気の発生が期待出来ない。次回使用の為に、空気中の水分を吸収する時間を与えること。2時間位放置しても、まだ湿気の発生が少ない場合は更に1時間放置する。
- 4) パック本体のみをレンジに入れる。
- 5) その他の注意
 - ① パックが汚れたら、手洗い洗濯が可能。使用後2時間放置後、本体が冷めたのを確認してから、冷水で、薄めの中性洗剤で手洗いしてよくすすぎ、洗濯後は24時間放置、完全に乾燥させること。
 - ② 治療に必要な時間・量を超えないように注意すること。

【留意事項】

レンジ加熱によっては加熱方法に誤りがないにも拘らず、稀に本体に穴が開いたり、タグ(品質表示/注意書きの布片)が変質することがある。これは加熱時に一部分に高周波が集中してヒートスポットが出来たり、あるいは付着物が焼けたためであり、製品の瑕疵、或いは不良によるものではない。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 直射日光を避け、常温の室内にて保管すること。
- 2) 長期間使用せず、ビニール袋にて保管の場合は完全に密封せず、ビニール袋の口を少し開けておき、通気性を保っておくこと。
- 3) パックは繰り返し使用出来るが、消耗品の要素があるので、湿熱の発生量が少なくなったり、外見上汚れがひどかったり、糸がほつれたり等、使用上劣化がひどいと思われる場合は新品と交換すること。

【文献請求先】 アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752
製造元: ブルーダー・ヘルスケア・カンパニー
(アメリカ・ジョージア州)