

医04 整形用品  
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

## NARロールガーゼ

### 禁忌・禁止

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

ガーゼパック 約7.6cm x 5.0cm x 2.5cm



ロールガーゼ:

サイズ: 巾約11.4cm x 長さ374cm  
(2枚重ね / 6重折に圧縮)

重さ: 34g



素材: コットン

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する。

### 【使用方法等】

本品は単回使用である。

1. パッケージを開ける。

2. ガーゼパックを取り出す。

3. ガーゼパックを破り、  
ガーゼを取り出す。

4. 使用目的に応じ適宜使用する。



### \*【使用上の注意】

1. 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
2. 開封後は早めに使用すること。
3. 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
4. 本品は医師、もしくは十分トレーニングを受けた者が使用すること。
5. 本品は単回使用である。

### 【包装】1個単位

### 【ロット番号】パッケージ又は被包に表示

### 【保管方法及び有効期間等】 常温・常湿

### 【主要文献及び請求先】

請求先: アコードインターナショナル株式会社

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: アコードインターナショナル株式会社  
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4  
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752  
製造元: ノースアメリカンレスキュープロダクツ社  
North American Rescue, LLC.  
(アメリカ・サウスカロライナ州)