

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 医療用不織布 34655000

再使用禁止

## キトサム100

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

#### ①形状、構造

	キトサム 100 04 止血包帯	キトサム 100 44 止血包帯	キトサム 100 06 止血包帯
製品番号	CTS100-04	CTS100-44	CTS100-06
サイズ	10cmx10cm	7.6cmx1.22m	7.6cmx1.83m
重さ	8g	20g	24g
原材料	キ ト サ ム		
形状			
			

#### ②原理

出血部位を覆うと、プラス電荷されたキトサムがマイナス電化された血小板・赤血球と結合し、さらに血液を吸収し、血餅を形成する。形成された血餅が出血部位を塞ぎ出血を止める。

### 【使用目的は効果】

創傷の出血を止血するために使用する。

### 【使用方法等】

1. 創傷の面積・出血量に適したキトサムを選択する。
2. キトサムで創傷を覆うか、創傷が深い場合は押し込む。
3. 出血が止まるまで、3分間しっかり圧迫する。  
包帯を巻いて創傷への圧迫を維持する。

キトサムを取り除く時、キトサムが少し残った場合は、滅菌された生理食塩水か水ですすぐ。

### 【使用上の注意】

- ・包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
- ・包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないこと。
- ・開封後は早めに使用し、使い切ること。
- ・眼には使用しないこと。
- ・使用後は出来るだけ早く医師の処置を受けること。
- ・正規の医療処置を行う時は事前に凝固血類を完全に取り除くこと。

### 【保管方法及び使用期間等】

- ・室温にて保管
- ・使用期限:パッケージに表示

### 【包装】 1個単位

### 【文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社  
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: アコードインターナショナル株式会社  
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4  
TEL:03-3299-6751 FAX:03-3299-6752

製造業者: サムメディカルプロダクツ社  
SAM MEDICAL PRODUCTS  
(アメリカ・オレゴン州)