

NARニードルキット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

14gaケース



10gaケース




全長: 132mm

ニードル (14ga / 10ga)



ニードル長: 102mm

カテーテル

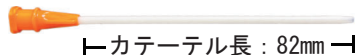

カテーテル長: 82mm

【原材料・寸法】

ケース本体: ABS 樹脂 (140x18x20.3mm、重さ 15g)

ケースキャップ: ABS 樹脂

ニードル: ステンレス

ニードル上部: ポリスチレン

カテーテル: ポリウレタン (14ga、10ga)

カテーテル上部: ABS 樹脂

【使用目的又は効果】

本品は軍・軍関係機関及び救急医療において、
肺損傷に伴う緊張性気胸に緊急対応する胸腔脱気
ニードルである。

(米国陸軍戦傷外科研究所の研究によれば、14 ゲージ
脱気ニードルの胸膜腔挿入による減圧は最も合併症の
危険性の少ない適切な処置と報告されている。)

【使用方法等】

1. 使用前にニードルキットケースが完全にシール（密封）
されていることを確認する。ケースがシール（密封）
されていない場合は当該品は使用せず、廃棄する。
2. ケースを開封し、ニードルチューブに汚れ、つぶれ、
折れ曲がり等の異常がないことを確認する。
3. 鎖骨中線上第2肋間に刺し入れる。
4. 刺し入れたニードルは搬送中に外れたり、位置が
ずれたりしないように胸部にテーピング固定する。
5. 本品は使用方法を熟知した医師又は医師の監視下で
十分にトレーニングを受けた者が使用すること。

【使用上の注意】

1. ニードルキットケースがシールされていなかったり、
破損している場合、製品そのものに異常が見られる
場合は使用しないこと。
2. 包装を開封したら、すぐに使用し、使用後は感染
防止に注意して、安全な方法で処分すること。
3. 併用する医薬品・医療機器の添付文書を確認後、
使用すること。
4. 本品をメスやハサミ等で破損しないこと。
5. 本品は単回使用である。再使用しないこと。
6. 本品は医師又は十分にトレーニングを受けた者が
使用すること。

【保管方法及び使用期間等】

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温・多湿を避けて保管
- ・使用期限: ニードルキットケースに表示

【包装】1個単位

【主要文献及び請求先】

請求先: アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752
製造元: ノースアメリカンレスキュー社
North American Rescue, LLC
(アメリカ・サウスカロライナ州)