

SAMチェストシールコンボ

再使用禁止

禁忌・禁止

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッケージ:パウチパック 約23.cm x 19.3cm
重 さ:約 89g

チェストシール:約23.cm x 19.3cm
バルブ 高さ:約 1.5cm



【原材料】

チェストシール
バルブ2.0
表 面 : ポリウレタン
バ ル ブ : ポリウレタン
裏 面 : ハイドロジェル
ライナー: ポリエステル

チェストシール
スタンダード
表面:ポリウレタン
裏面:ハイドロジェル

【使用方法等】

1. 創傷の汚れをきれいにする。
2. パッケージを開け、チェストシールを取り出す。
3. タブを持ち、透明なライナーを剥がす。
4. チェストシールを接着面を下にして、創傷を中心にして貼る。
5. 確実に閉塞するよう、チェストシールを上からしっかり押さえる。
6. チェストシールを剥がすときは医師の指導または監視下で行う。

【使用上の注意】

- ・ 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
- ・ 開封後は早めに使用すること。
- ・ 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
- ・ 本品は医師もしくは十分なトレーニングを受けた者が使用すること。
- ・ 包装に使用期限の表示がないもの、使用期限後のものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光および高温多湿を避け、水漏れに注意し室温にて保管
- ・ 有効期限:パッケージに表示

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【使用目的又は効果】

- ・ 傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。
- ・ 胸部の深部銃創、切傷、刺傷に対応し、創傷を閉塞する。
- ・ バルブは一方方向弁で、身体内の空気を外部へ排気し、外部からは入れない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: アコードインターナショナル株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-9-4
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

製 造 業 者: サム メディカル プロダクツ社
SAM MEDICAL PRODUCTS
(アメリカ・オレゴン州)