

医04 整形用品
一般医療機器 液体包帯 33584000

ウォータージェルボトル

【形状・構造及び原理等】

製品名	ウォータージェルボトル	
製品番号	WJP0120	WJP0050
内容量	120ml	50ml
形状	※ 	

- 熱伝導の作用により熱傷の熱を下げる。

【原材料】

- 主成分：純水
- 成分：カルボマー
グリセリン
ヒアルロン酸

【使用目的又は効果】

- 熱傷部の熱を下げる。
- 熱傷の拡大を防止する。
- 熱傷の痛みを和らげる。
- 熱傷部の湿潤を保つ。
- 感染を防止する。

【使用方法等】

- 処置部に適量のジェルを塗布する。
- 熱傷部にこすりつけない。
- 熱傷部を充分な量のジェルで、30 分間以上覆う。
- 必要に応じ、ジェルを追加で塗布する。
- 必要に応じ、処置部をガーゼや包帯で覆う。

【使用上の注意】

- 外用
- 軽度の熱傷用
- 次のような症状が7日以上続くようなら、使用を中止し医師へ相談すること
かぶれ、赤み、腫れ、痛みの持続、発疹、
感染症の症状

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管
- 有効期間：パッケージに表示

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL:03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

製造業者：ウォータージェル テクノロジーズ社
Water-Jel Technologies, LLC
(アメリカ・ニュージャージー州)