

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器機器 鉗子 10861001

NARロチェスターペアン

禁忌・禁止

【使用目的又は効果】に記載した使用以外の目的には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



サイズ：約 15.9cm

重さ：約 85g

原理

リング状のハンドルを開閉することにより、先端部を開閉させる。

【使用目的又は効果】

臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる。

【使用方法等】

リング状のハンドル部を開閉し、目的部位を把持する。
必要に応じ、ロック部を使用することにより先端部の把持を継続する。

【使用上の注意】

1. 使用目的以外に使用しないこと。
2. 折損、曲がり等の原因になりうるので使用時に必要以上の力（応力）加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

・直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後、血液、体液、組織などの汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 洗剤の使用に関しては、洗剤の添付文書を参照すること。
3. 超音波洗浄装置などで洗浄する時は、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
5. 強アルカリ・強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

製造業者：ノースアメリカンレスキュー社
North American Rescue, LLC
(アメリカ・サウスカロライナ州)