

再使用禁止
一般医療機器

歯 (09) 歯科用研削材料
歯科用ゴム製研磨材 70903000
販売名：ポリッシングシリコンディスク

【警告】

- 指定の最高許容回転速度（回転数）を越えて使用すると、切削中に破折し、人体を傷つける恐れがあるので、指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。
- ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを必ず確認すること。
- 本品は未滅菌である。使用する前は適切な方法で消毒してから使用すること。（但し再使用禁止）

【禁止】

- 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
- 器具の形態変更や改造等はないこと。
- 長期使用した場合や機能の低下が目立った場合は使用を中止し、適切に廃棄すること。

【形状・構造及び原理等】



原材料：シリコン

【使用目的、効能及び効果】

切削用ホイール

薄めのディスクは主にポーセレンや硬質レジン
の歯冠分離、歯冠形成及び形態修正等に使用する。

厚めのディスクは主に硬質合金（ニッケルクロム合金
等）のスプール線のカット等に使用。

コンポジットレジン、硬質レジン、ポーセレン歯
台形成などの仕上げ研磨に使う。

【品目仕様等】

ISO13485 と CE の品質基準に基づいて品質管理が行
われている。

【操作方法又は使用方法等】

歯科用マンドレルに装着し回転させ使用する。

回転数：20,000 r.p.m. 以下で使用するこ
と。

【使用上の注意】

- ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってマ
ンドレルのシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャ
ックでないことを確認すること。
- 指定の回転数を超えて使用しないこと。
回転数：20,000 r.p.m 以下
- 使用前に予備回転を行い、振れが無いことを確認す
ること。
- 頭部が大きい形状のため、折れ曲がったりすることが
あるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避ける
こと。
- 本品を使用する場合は、局所吸塵装置、公的機関が認
可した防塵マスク等を使用すること。
- 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。
- 再使用する際には必要に応じ、清掃液、消毒剤を用い
て附着物を除去し、薬剤による消毒を行うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 清潔で湿度が高くない場所にて、保管、管理するこ
と。
- 錆びている器具と一緒に収納保管しないこと。
- ヨードグリセリンなどの科学薬品と一緒に収納保管
しないこと。
- 使用有効期間は 5 年である。ただし、機能が目立つた
場合、損傷、変形、錆び、汚染等が見られた場合は使
用を止めること。

【包装】

1 ケース：100 枚入り

【文献請求先】

株式会社コサカ
〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 2-18-14

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

<製造販売業者>
株式会社コサカ
住所：〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 2-18-14
電話番号：03-3557-4111(代表)

第 3 種医療機器製造販売業許可 13B3X00551

<外国製造業者>
Midst Enterprise Co., Ltd. (台湾国)