


機械器具 32 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ 34858000
プレメント採精シート mini

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

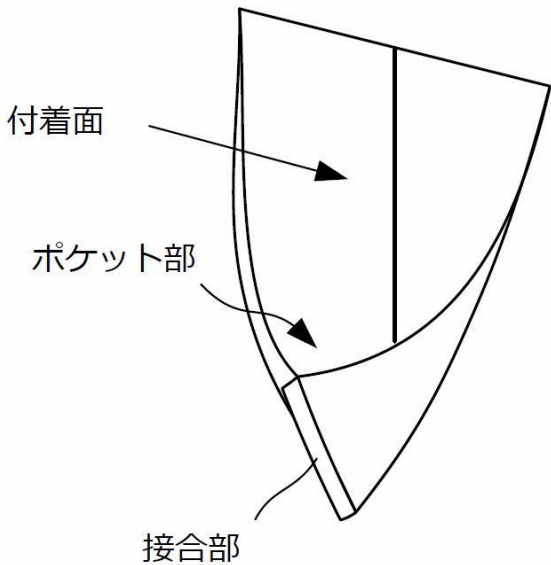

寸法:縦 150mm×横 105mm

各部の名称および成分

名称	成分
プレメント採精シート mini	PET12 μ LLDPE 75 μ シート

【使用目的、効能又は効果】

1. 本品は精子を採取するために使用される。
2. 本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法等】

1. シート上部を開き、両サイドのテープで固定具にたわみなく貼り付ける。
2. シート下部を下方方向に無理なく引き形を整え、シート先端(手前側)を固定具くぼみにひっかける。
3. マスターベーションを行い射精を行う。
4. 採精後は速やかにシリンジなどで精液を吸い取る。

【使用上の注意】

1. 万一、包装が破損している場合、または製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 感染症を予防するためによく手を洗い、清潔な環境で使用する。
3. シートの内側(撥水面)は極力触れないようにする。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【包装】

1 枚/1 袋入

***【製造業販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売元
株式会社 オンリースタイル
〒165-0035 東京都中野区上鷺宮 3-16-9 オーエスビル
TEL:03-4455-7426 FAX:03-4586-6331
MAIL:customer-info@onlystyle.jp