

機械器具64 歯科用探針  
一般医療機器 歯周ポケットプローブ JMDN 31848000

## カラービュープローブ

### 【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

### \*\*【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、ネジ式のチップ及びハンドルからなる。

### \*\*【種類】

本品には、以下の種類がある。

種類	品番	(交換チップ)
Sキット11	PCV11KIT6	PCV11PT
Sキット12	PCV12KIT6	PCV12PT
SキットUNC	PCVNCKIT6	PCVUNC12PT
Sキットウィリアムズ	PCVWKIT6	PCVWPT
Sキット片頭 ゴールドスタイン	PPSGKIT6	PPSG12PT
Sキット片頭 オックスフォード	PCVOKIT6	PCV012PT
Lキット11	PCV11KIT12	-
Lキット12	PCV12KIT12	-
LキットUNC	PCVNCKIT12	-
ペリオスクリーンSキット10	PPS10KIT6	PPS10PT
ペリオスクリーンSキット12	PPS12KIT6	PPS12PT
ペリオスクリーンLキット10	PPS10KIT12	-
ペリオスクリーンLキット12	PPS12KIT12	-
ペリオスクリーンPキット10	PPSPROM10	-
ペリオスクリーンPキット12	PPSPROM12	-
バイオタイプ スターキット	PBTPKIT12	PBTPG (グリーン) PBTPB (ブルー) PBTPW (ホワイト)

品番の末尾の数字（6）はハンドルの種類を示す。

### ハンドルの種類

サテンスチール（6番）

### 【使用目的又は効果】

口腔内診査（歯周ポケットの深さ測定）に用いる。

### 【使用方法等】

作業部を歯肉構（歯周ポケット）に挿入し、目盛を読み取って深さを測定します。

### 【使用上の注意】

〔使用方法〕

- 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。

- 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- 破折の原因となる過度の加圧での使用は避けること。
- 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の改造は行わないこと。
- 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコウム、塩化ベンゼトニウム、ホビトヨード、ホルミン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- 薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- 「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

- 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。（使用上の注意参照）
  - 洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
  - 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
  - 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
  - 滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
  - 点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
  - 177℃以上に加熱しないでください。
  - フェノールは使用しないこと。
  - 必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
  - 滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
  - 樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

### 【包装】

〔キット〕

ハンドル 1本  
チップ 7個  
（\*バイオタイプスターキットは、ハンドル2本、チップ12個）

〔交換チップ〕

・チップ各種 12個入

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社  
電話番号： 03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC（米国）