

機械器具42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 70683000

ペリオスチール

【禁忌・禁止】

[適用対象（患者）]

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

* 【形状、構造及び原理等】

[形状、構造]

本品は、骨膜、粘膜等の組織を剥離する刃のついた作業部及びハンドル部からなる。

* 【種類】

本品には、以下の種類がある。

種類	品番
アレン	PPAEL P9A6 PPAELX PPAELP PPAELPX PPAELA PPAELAX PPAELS6 P9A PPAELSX PPAELAS6 PPAELASX
ウッドソン	PFIWDS1X PFIWDS1S6
ウィリガー	PWILL
オール	P10
グリスデイル	PGR1
クレイマー・ネビンズ	PKN1 PKN16 PKN152 PKN1526 PKN152X PKN152S6 PKN152SX
ゴールドマンフォックス	P14 P146 P14X
シシリア	P20SIC6 P24GSIC6 P24GSIC P20SIC
シミオン	PP5590SIM
ショートハンドル	P24GSP P24GSP6 P24GSPX
スイスペリオ 改良型	SPP24GSPX SPP24GSICX SPPH2X SPPSCHLEEX SPP24GSP2X
ステイグマンズブリッター	PPSTEIG
スパー バピラ	PPSPAHR6
セルディン	P23
タバネラ	TABANELLA1
ツインハイム	IPZ1 IPZ16 IPZ2 IPZ26 IPZ3 IPZ36
デミレル	PDEMIRELS6
ドノス	PDONOS
トロンベリ	PTROM16
ハーシュフェルト	P20 P206
ハワード	P9H P9H6
ブーザー	PPBUSERX PPBUSER PPBUSER6 PPBUSERSX
ブーザー・ホーリガン	PPBUH2MX PPBUH2MX
フリーア	P15 P156 P16 P166 PFN
ブリチャード	PPR3 PPR36 PPR3S PPR3S6 PPR3X
ベネット	P12S P12S6
ベンキー	PBQ PBQ6
ホークスター	HOEXTER4
ホーリガン	PH1 PH2 PH26 PH26M
ホブキンス	P1 P1H6 P2 P26
ミード	P3 P36
ミッシュ	PP5504
ミニミー	PFIWDS1MK PFIWDS1MKX
モルト	P5 P9 P96 P9X
ラバンカ	PPLABANCA PPLABANCA6
ラバンカ 改良型	PPLABANCA2 PPLABANCA26 PPLABANCA36 PPLABANCA3X
(呼称なし)	PP25 P8D6 P24G PPR3/9A6 PPR3/9A P9/PA P9/PA6 P149 P1496 P8D

それぞれの種類には、以下のいずれかの形態がある。

ハンドル部	<ul style="list-style-type: none"> ・角柄：2番 5番 502番 510番 522番 ・丸柄：4番 10番 41番 ・ブラックライン ・サテンスチール：6番 6S番（ショート） ・スムースハンドル：SS
-------	---

【使用目的又は効果】

骨膜、粘膜等の組織の剥離に用いる。

【使用方法等】

作業部の刃で、骨膜、粘膜等の組織を剥離します。

【使用上の注意】

[使用方法]

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- (2) 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- (3) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- (4) 破折の原因となる過度の加圧での使用は避けること。
- (5) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- (6) 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の改造は行わないこと。
- (7) 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ホビトヨード、ホルミン・フェール、グルコン酸カルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ・点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
- ・177℃以上に加熱しないでください。
- ・フェノールは使用しないこと。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- ・樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【包装】

単品包装： 1本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社

電話番号： 03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (米国)