

カラーマウスガード

【禁忌・禁止】

- ・使用期間が30日を超えないこと

【形状、構造及び原理等】

本品は、円形及び正方形のプレートである。
厚さ(mm)、パターンは以下のとおり

	厚さ	パターン
円形：直径 120mm 正方形：一辺 125mm	2.0	ブライトレッド
		ブライトイエロー
	4.0	ブライトブルー
		ブライトグリーン
		ブライトピンク
		ディープレッド
		ダークブルー
		ライトブルー
		マルーン
		ディーブグリーン
		ピュアホホワイト
		ディーブブラック
		ゴールド
		シルバー
オレンジ		

※その他、1枚に複数の色を組み合わせていることがある。

原材料

エチレン・酢酸ビニル共重合体、顔料

**[物理的特性]

項目	規格値
密度	0.94 g/cm ³
引張強さ	24 MPa
曲げ強度	-
破断時伸び率	1000 %
弾性率	-
ビカー軟化温度	40 °C
硬化後収縮率	-
ショア硬さ	80

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用咬合スプリントを作製するために用いる材料である。
ただし、使用期間が30日を超えるものではない。

【使用方法等】

〈使用中の操作〉

1) 軟化準備

エルコデント社製の歯科技工用成型器の操作方法に従い、本品を装着する。

2) 軟化温度/時間、冷却時間

軟化温度/時間及び冷却時間は、本品の厚さ及び各成型器に従い設定する。

■軟化温度/冷却時間	軟化温度		冷却時間	
	2.0 mm	4.0 mm	2.0 mm	4.0 mm
エルコフォーム 3D エルコプレス 300Tp エルコプレス 300Tp-ci	110°C	100°C	3分	6分

■軟化時間	2.0 mm	4.0 mm
エルコプレス ES-200E	55 秒	2分5 秒
エルコフォーム RVE		

※エルコプレス ES-200E 及びエルコフォーム RVE は販売を終了しています。

3) 模型の取り出し

極力変形を起こさないよう取り外す

4) 辺縁の研磨

カーバイドバー等で形態を整え、さらに歯科用研磨器材で研磨する。

〈使用方法等に関する使用上の注意〉

- 1) 本品の作業設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、作業により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
- 2) 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 3) 本品の研磨作業などの際には、粉塵等から目を保護する為、保護メガネ等を着用すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 本品に用いられた原材料成分又は類似成分のものに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 3) 使用方法、注意事項を患者に説明し、不具合が生じた場合はただちに調整もしくは製作しなおすこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- **1) 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、-5~45°Cの範囲で保管すること。
- * 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〈使用期限〉

- 1) 本品は、包装に記載の※使用期限までに使用すること。[記載の使用期限は製造元データによる。]
※ (例 04.2007 : 2007年4月を示す。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉


* 株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

〈製造業者〉

ERKODENT Erich Kopp GmbH
国名：ドイツ