

器具機械 39 医療用鉗子

一般医療機器 鉗子 10861001

浅川A Y H鉗子

【警告】

- 本品を使用する前に必ず適切な洗浄、滅菌を行うこと。

[感染等の恐れがあるため]

- 本品を洗浄または滅菌する場合は、ラチェットを完全に開放した状態で行うこと。

[ラチェットをかけた状態で洗浄または滅菌を行うと、洗浄または滅菌の不良や、破損の原因になります。]

- 本品を使用中に電気メス先を直接接触させないこと。

[感電、火傷の原因となるため]

- 本品を使用後に取り扱う際は、必ず手袋を着用するなど感染対策に努めること。[感染等の恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

●形状



寸法：長26cm 幅：6.5cm 質量：71g

●材質

ステンレス鋼

●関節部

ハズシ型

【使用目的、効能又は効果】

本品は子宮頸管拡張術において子宮腔部を把持するために用いる手術器具です。

子宮腔部の形状に応じて、先端部を使い分ける事により、適切な把持を行うことが出来ます。また、本品は再使用可能です。

【操作方法又は使用方法等】

- (1) 使用前に本品が洗浄・滅菌されていることを確認して下さい。
また、傷や曲がり、刃の損傷、可動部の異常等がないことも確認して下さい。異常が発見された場合は使用を中止して下さい。
- (2) 使用後は、付着している血液、体液、組織および薬品等が乾燥・個化しないうちに、できるだけ早く洗浄して下さい。
- (3) 洗浄後は滅菌し、次の使用に備えて適切に保管して下さい。

【使用上の注意】

- 本品を購入後初めて滅菌する際には、出荷時に油引き等の防錆処理がなされている場合があるので、洗浄してから滅菌すること。
- 使用前に洗浄・滅菌されていることを確認すること。
- 本品の使用に際し、手術手技を十分に理解した上で使用すること。
- 本品を使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。
- 本品に過度の力を加えたり、無理な使用はしないこと。


- 本品に異常がある場合、又は本品が破損している場合は、「使用禁止」と表示し使用しないこと。

- 分解・組立時には、関節部を正しい手順で接合すること。

分解：鉗子を90°に開いた状態でオス側(塚原鉗子側)を保持したまま、メス側(単鉤鉗子側)を矢印の方向へひねる。

組立：鉗子を90°に開いた状態でオス側(塚原鉗子側)を保持したまま、メス側(単鉤鉗子側)を矢印と逆の方向へひねる。

注意：組立の際には他の鉗子と混同しないよう関節部の組み合わせ数字(刻印)を確認して組み立てること。

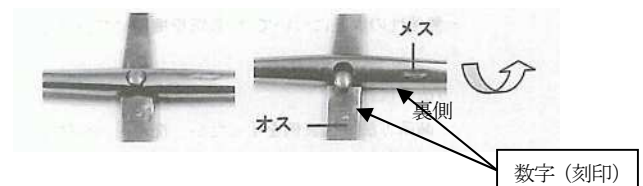

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

耐用期間

- 本品の耐用期間は5年です。[自己認証データによる]

保管

- 滅菌後は、次の使用時まで汚染のない方法で清潔な場所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

洗浄

- 感染防止の為、使用後できるだけ早く、血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄してください。
- 汚物除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適した物を選択し、適正な濃度で使用してください。
- 洗剤の残留がないように充分すすぎをしてください。仕上げすすぎには、精製水を用いることを推奨します。
- 洗浄装置で洗浄するときには、刃物同士が接触して刃先を損傷することがないように注意してください。また、関節部等の可動分は開放して汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納してください。
- 強アルカリ/強酸性洗剤・塩素及びヨウ素を含む消毒液は器具を腐食させる恐れがありますので、使用しないでください。
- 金属たわしやクレンザー(磨き粉)等は器具の表面を傷つけますので使用しないでください。
- 洗浄後は、腐食防止のため必ず乾燥させて下さい。

滅菌

- 洗浄後、傷や曲がり、刃の損傷、可動部の異常等がないことを点検した上で、滅菌してください。
- 滅菌にあたっては、関節部等の可動部は解放し確実に滅菌できるよう配慮して下さい。
- 滅菌作業は、滅菌器の取扱説明書にしたがって行って下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- 製造販売業者：トーイツ株式会社

神奈川県横浜市港北区綱島東5-10-3

TEL. 045(543)1121

FAX. 045(546)1313

- 製造所の名称：トーイツ株式会社 綱島工場