

再使用禁止

CVN バンデージ

【警告】

1. 救急救命の訓練を受けた上で使用すること
2. 血液、体液で汚染された場合は廃棄すること
[交差感染の可能性がある]
3. 内包装に破損がある場合は使用しないこと [滅菌状態が保持できず、感染のリスクがあるため]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

1.2 本体



1.3 各部位の説明

番号	名称	機能または動作
①	伸縮包帯	伸縮する素材で構成されており、創傷部位に圧迫を加えながら巻き付ける
②	パッド	創傷部位の保護のためのパッドで、創傷部位に当てて使用する
③	ハンドルループ	本品を創傷部位に適用する際に、この部位を手で持って固定する
④	プレッシャーバー	この部位に伸縮包帯を通し、折り返すことで創傷部位に圧迫を加える
⑤	クロージャージャーバー	本品を巻き終えた後に末端で固定するために使用する

2. 原材料

番号	名称	原材料
①	伸縮包帯	コットン、ポリアミド繊維、ポリウレタン
②	パッド	フラッフバルブ

3. 寸法・仕様

3.1 寸法

種類		サイズ (cm)	パッド (cm)	外装込 重量(g)
レスポonder バンデージ	4 インチ	10 x 480	10 x 20	80
	6 インチ	15 x 480	15 x 20	110
アブドミナル バンデージ	8 インチ	20 x 480	50 x 50	220
タクティカル レスポonder バンデージ	4 インチ	10 x 480	10 x 20 (2 枚入)	100
トラウマ バンデージ	4 インチ	10 x 480	10 x 20	70

3.2 付属品

- アブドミナルバンデージ、トラウマバンデージには、プレッシャーバーが付属しない。
- アブドミナルバンデージには、プラスチックラップ(60 x 60 cm)が付属する。

*【形状・構造及び原理】

1. 外観図

1.1 外装

代表的写真 4 インチ トラウマバンデージ
(イエローパッケージ)



代表的写真 4 インチ トラウマバンデージ
(ブラックパッケージ)



本品は、傷や汚損から内容物を保護する目的の外包装と、滅菌済みの伸縮包帯が圧縮状態で入っている内包装の、二重包装になっている。

イエローパッケージとブラックパッケージは、外装と有効期間が異なるのみで、本体形状に変化はない。

詳細は 3.寸法・仕様の項目で記載する。

- タクティカルレスポnderバンデージは、本体縫い付けのパッドに、追加パッドが1枚付属する。その他に、プラスチックラップ(42 x 42 cm)、ガーゼ(10 x 75 cm)が付属する。

4. 原理

出血部分をパッドで覆い、圧力をかけて包帯を巻くことにより、損傷部位を保護し止血を促す。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する。

【使用方法】

- (1) 外包装を開封し、内包装から本品を取り出す。
この時、内包装に破損がないか確認する。破損があった場合、感染のリスクがあるため使用しないこと。
- (2) ハンドルループを手に持ち、プレッシャーバーが創傷部位の上に来るようにパッドを当て、圧迫を加えながら伸縮包帯を巻いていく。プレッシャーバーがない種類の場合は、創傷部位が保護できる位置にパッドを当て、伸縮包帯を巻いていく。
- (3) 一巻したあと、プレッシャーバーに伸縮包帯を通し、圧迫を加えながら反対方向に巻き戻す。プレッシャーバーがない種類の場合は、そのまま圧迫を加えながら巻いていく。
- (4) パッドの端が隠れるようにしっかりと巻いていく。
- (5) 末端まで巻き終えたら、クロージャーバーの両端を伸縮包帯の端に引っ掛けるようにして固定する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 血液、体液等で汚損の場合は廃棄すること。
- (2) 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期間

- イエローパッケージ：8年（ガンマ線滅菌 外装に記載）
- ブラックパッケージ：10年（ガンマ線滅菌 外装に記載）

【保守・点検に係る事項】

内包装に破損がある場合は使用しないこと。

（滅菌状態が保持できず、感染のリスクがあるため）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル

2. 製造業者

Anji Hengfeng(中華人民共和国) 又は

*CVN Medical Solutions（フィンランド）