

医04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

「滅菌」 ツェッペル X 1号

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

本品は、綿100%のガーゼを丸め成形し、滅菌したものである。
内部にX線造影材を含むことにより、X線で検知することができる。

綿繊維の吸水性を利用し、液の吸収又は止血を行う。
また、本品の形状を利用し、手術時の組織の剥離を行う。

【使用目的又は効果】

液の吸収、止血、組織の剥離

【使用方法等】

本品を適用部位に接触させ、液の吸収又は止血に用いる。
また、手術時に本品を適用部位に押し当て、組織の剥離に用いる。

【使用上の注意】

袋が開封、破損又は汚損している場合は、滅菌品として使用しないこと。
開封後は、直ちに使用すること。
使用後は、感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない
清潔な場所に保管すること。

2. 使用期限

使用期限〔自己認証（自社データによる）〕を、袋及び外装
に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9279-69

※ 製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター

※ 住重アテックス株式会社 つくばセンター

※ 住重アテックス株式会社 関西センター

湖北金士達医用産品有限公司（中国）
（KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS Co., Ltd）

発売元 株式会社 竹虎
商品に関するお問合せ先 0120-094-315