

\*\*2023 年 9 月 14 日(第 4 版)

製造販売届出番号 14B3X10037000002

\*2023 年 7 月 10 日(第 3 版)

医療用品 04 整形用品  
一般的名称 医療ガーゼ 13700000  
CVN バンデージ

再使用禁止

【警告】

- 1.救急救命の専門家から救急救命の訓練を受ける事
- 2.血液体液で汚染された場合は廃棄すること。

【禁忌・禁止】

製品を改造・分解しないこと  
再使用禁止

\*\*【形状・構造及び原理】

1. 外観図



ガンマ線滅菌(有効期限 8 年 包装に記載)

2. 原材料

| 部位名      | 材質                      |
|----------|-------------------------|
| 圧力バー     | ナイロン樹脂                  |
| 伸縮包帯     | コットン、ポリアミド繊維、<br>ポリウレタン |
| クロージャーパー | ナイロン樹脂                  |
| 非粘着パッド   | フラッフパルプ                 |

3. 寸法

| 種類                                 | 包帯<br>(cm) | パッド<br>(cm) | 重量<br>(g) |
|------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 4 インチレスポンダー<br>バンデージ               | 10x480     | 10x20       | 68        |
| 4 インチタクティカル<br>レスポンダーバンデージ         | 10x480     | (10x20)x2   | 100       |
| 4 インチトラウマ<br>バンデージ                 | 10x480     | 10x20       | 62        |
| 6 インチレスポンダー<br>バンデージ               | 15x480     | 15x20       | 98        |
| 8 インチアブドミナル<br>バンデージ               | 20x480     | 45x47       | 202       |
| 8 インチアブドミナル<br>バンデージ<br>プレッシャーバー付き | 20x480     | 45x47       | 143       |

包帯全長：最大伸長時

4. 原理

出血部分をパッドで覆い、圧力をかけて包帯を巻くこと  
により、損傷部位を保護し止血を促す。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保  
護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する  
ことを目的とする主としてガーゼから成る器具。

\*\*【使用方法】

本品は、傷病者自ら片手で被覆することが可能である。

- (1) 傷口にパッドを乗せ、伸縮包帯を巻いていく。
- (2) 伸縮包帯を圧力バーの中に完全に通し、  
反対方向に巻き戻す。
- (3) 伸縮包帯を圧力バーの上から巻き、  
パッドの端が隠れるようにしっかりと巻く。
- (4) 最後にクロージャーパーでしっかりと固定する。

トラウマバンデージには圧力バーなし。

アブドミナルバンデージには、圧力バーありとなしがある。

【使用上の注意】

- (1) 血液、体液等で汚損の場合は廃棄すること。
- (2) 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保  
管すること。 有効期限：製造後 8 年

【保守・点検に係る事項】

包材に破損がある場合は、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区一丁目 14 番地 20 光正第 2 ビル 301

株式会社オーストリッチインターナショナル

電 話：045-470-9041 (代)

F A X：045-470-9043

製造業者

Anji Hengfeng(中華人民共和国)