

**2023 年 9 月 25 日(第 5 版)

製造販売届出番号 14B3X10037000002

*2023 年 9 月 14 日(第 4 版)

医療用品 04 整形用品
一般的名称 医療ガーゼ 13700000
CVN バンテージ

再使用禁止

【警告】

- 1.救急救命の専門家から救急救命の訓練を受ける事
- 2.血液体液で汚染された場合は廃棄すること。

【禁忌・禁止】

製品を改造・分解しないこと
再使用禁止

**【形状・構造及び原理】

1. 外観図



ガンマ線滅菌(有効期限 8 年 包装に記載)

2. 原材料

部位名	材質
圧力バー	ナイロン樹脂
伸縮包帯	コットン、ポリアミド繊維、 ポリウレタン
クロージャーパー	ナイロン樹脂
非粘着パッド	フラッフパルプ

3. 寸法

種類	包帯 (cm)	パッド (cm)	重量 (g)
4 インチレスポンダー バンテージ	10x217	10x20	68
4 インチタクティカル レスポンダーバンテージ	10x189	(10x20)x2	100
4 インチトラウマ バンテージ	10x210	10x20	62
6 インチレスポンダー バンテージ	15x230	15x20	98
8 インチアブドミナル バンテージ	20x218	45x47	202
8 インチアブドミナル バンテージ プレッシャーバー付き	20x180	30x25	135

4. 原理

出血部分をパッドで覆い、圧力をかけて包帯を巻くこと
により、損傷部位を保護し止血を促す。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保
護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する
ことを目的とする主としてガーゼから成る器具。

*【使用方法】

本品は、傷病者自ら片手で被覆することが可能である。

(1) 傷口にパッドを乗せ、伸縮包帯を巻いていく。

(2) 伸縮包帯を圧力バーの中に完全に通し、
反対方向に巻き戻す。

(3) 伸縮包帯を圧力バーの上から巻き、
パッドの端が隠れるようにしっかりと巻く。

(4) 最後にクロージャーパーでしっかりと固定する。

トラウマバンテージには圧力バーなし。

アブドミナルバンテージには、圧力バーありとなしがある。

【使用上の注意】

(1) 血液、体液等で汚損の場合は廃棄すること。

(2) 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保
管すること。 有効期限：製造後 8 年

【保守・点検に係る事項】

包材に破損がある場合は、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区一丁目 14 番地 20 光正第 2 ビル 301

株式会社オーストリッチインターナショナル

電 話：045-470-9041 (代)

F A X：045-470-9043

製造業者

Anji Hengfeng(中華人民共和国)