

医療用品 〇 5 整形用品
一般的名称 医療用不織布 34655000
セロックスラピッド

再使用禁止

【警告】


パッケージが破損した場合または開封した状態で保管した場合は使用不可
手術用には使用不可
目の処置には使用不可（炎症の恐れがあるため）

【禁忌・禁止】

救急の訓練を受けた者による使用とする
再使用は不可（血液感染の可能性があるため）

【形状・構造及び原理】

1. 外観 Z 折りの状態

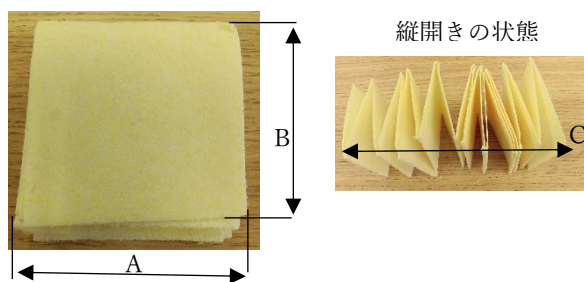


ガンマ線滅菌（有効期限 5 年）

寸法 (cm)

A	B	C
7.6	7.6	152.4
重量	27 g	

2. 構造

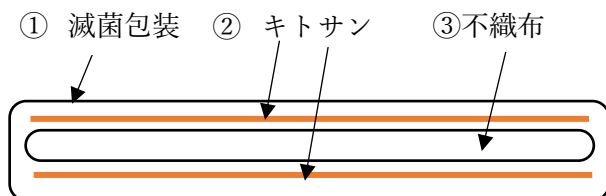

3. 原材料

ビスコース、ポリオレフィン、キトサン

4. 原理

出血面（部位）を覆うと、プラス電荷のキトサンにマイナス電荷の赤血球及び血小板が引き寄せられて凝固し出血が抑制される。また、赤血球と血小板が不織布ガーゼに凝固するため、再出血のリスクを防ぐ。

【使用目的又は効果】

創傷を処置するために用いる不織布からなる被覆・保護材

【使用方法】

1. パッケージを開封して取り出し Z 折となっているガーゼの一方を持つ
2. 広げた本器の端で出血箇所を覆ったあと創傷部全体を埋めるようにする。
3. 少なくとも 1 分間または出血が止まるまで創傷に対しての直接圧迫をしっかりと行ってください。
4. 創傷部位の圧迫止血を維持できるように適切な包帯等を巻き付けます。
5. 使い残しは適切に廃棄する。
6. 患者を速やかに移送する。
7. 使用した空のパッケージを次の医療機関に渡す。

【使用上の注意】

1. 適応対象は中度から重症の出血コントロールとする。
2. 一時的な外用として使用すること。
3. 目の処置に使用しないこと、万が一目に炎症が起こった場合は十分な水で 5 分以上洗浄する。
4. 本格的な処置の前に必ず滅菌生理食塩水で残留した顆粒を取り除き創部を十分に洗浄する。
5. 処理をした甲殻類のキトサンを使用

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
湿度の低い場所で室温保管
2. 有効期限
5 年（パッケージに記載）
滅菌品（ガンマ線）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区一丁目 14 番地 20
光正第 2 ビル 301

株式会社オーストリッチインターナショナル
電 話：045-470-9041（代）
FAX：045-470-9043

外国製造業者：MedTrade Products Limited.（イギリス）