

医療用品04 整形用品  
 一般的名称 救急絆創膏 34864000  
 フォックスチェストシール

## 再使用禁止

## 【警告】

1. 救急救命の専門家から救急救命の訓練を受ける事
2. 血液体液で汚染された場合は廃棄すること。

## 【禁忌・禁止】

包装に異常がある場合は、使用しないこと。  
 再使用禁止

## 【形状・構造及び原理】

(13cm×13.3cm)



(弁付き)



(弁無し)

ガンマ線滅菌(有効期限5年)

## 【原材料】

一方弁	ポリエチレン樹脂
台座、弁無し	ポリエチレン樹脂

## 【概要】

本品は、主に胸部の傷の被覆及び保護・傷口の皮膚接合・身体の創傷部位の支持等に用いる。穿通創が考えられる場合でも、一方弁により空気の排出ができ外気の流入を防ぐことを可能にしている。

## 【使用目的又は効果】

身体の部位に用いる、接着剤を付した、布製、プラスチック製等の絆創膏を言う。パッドを付する場合もある。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

## 【使用方法】

1. 創傷部位周囲の汚れをガーゼ等で拭き取ります。
2. パッケージを開封し、本品を取り出します。
3. 剝離シートを剥がし、創傷部位に貼り付けます。
4. 傷の向きに沿って一方弁が傷の上に重なるように、本品を貼り付けます。
5. 穿通創がある場合は、傷口の反対側の傷に本品の弁なしを同様に貼る。

## 【使用上の注意】

1. 血液、体液等で汚損の場合は、廃棄すること。
2. 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。有効期限：製造後5年
2. 使用期限内であることを確認してください。
3. 有効期限 滅菌後5年

## 【保守・点検に係る事項】

包材に破損がある場合は、使用しない事。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〒222-0033  
 神奈川県横浜市港北区一丁目14番地20  
 光正第2ビル301

株式会社オーストリッチインターナショナル

電話：045-470-9041(代)

FAX：045-470-9043

製造業者

MedTrade Products Limited.

製造先国名：イギリス