

2023年5月（第1版）

2023年6月（第2版）

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。

医療機器届出番号：14B3X10040000001

医療用品04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 JMDNコード 71105001

ベネクス リカバリーウェア

【禁忌・禁止】

- 異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、使用を中止すること。
- 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】


1.形状・構造

1. 6431 リチャージ+ ロングスリーブ メンズ



size	M	L	XL	XXL
着丈	72cm	74cm	78cm	83cm
身幅	49cm	51cm	55cm	59cm
袖丈	83cm	85cm	89cm	93cm
袖口幅	10cm	10cm	11cm	11cm

2. 6433 リチャージ+ロングタイツ メンズ

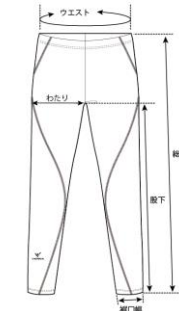


size	M	L	XL	XXL
ウエスト	70cm	74cm	80cm	86cm
わたり	24cm	25cm	27cm	30cm
裾口幅	10cm	10cm	11cm	11cm
総丈	94cm	97cm	100cm	104cm
股下	68cm	70cm	72cm	74cm

3. 6435 リチャージ+ ロングスリーブ レディース



size	M	L
着丈	63cm	66cm
身幅	45cm	49cm
袖丈	76cm	78cm
袖口幅	9cm	10cm

4. 6437 リチャージ+ ロングタイツ レディース

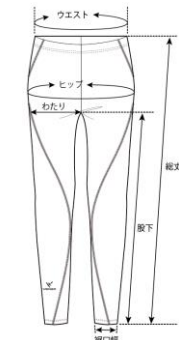

size	M	L
ウエスト	60cm	66cm
ヒップ	68cm	74cm
わたり	22cm	24cm
裾口幅	9cm	10cm
総丈	87cm	90cm
股下	65cm	67cm

5. 6430 リチャージ+ ショートスリーブ メンズ



size	M	L	XL	XXL
着丈	72cm	74cm	78cm	83cm
身幅	49cm	51cm	55cm	59cm
袖丈	43cm	46cm	50cm	54cm
袖口幅	17cm	18cm	20cm	21cm

6. 6434 リチャージ+ ショートスリーブ レディース



size	M	L
着丈	63cm	65cm
身幅	45cm	49cm
袖丈	41cm	42cm
袖口幅	15cm	16cm

2. 原理

本商品の繊維に含まれるDPV576粒子が体温の遠赤外線を放射し、温熱治療を行う。

【使用目的又は効果】

本製品は疲労回復を目的として、休養時に着用可能である。

遠赤外線の血行促進効果により、次のような健康効能が期待できる。

- 疲労の回復・改善
- 血液循環の改善
- 新陳代謝の促進
- むくみの改善
- 肩・腰・筋肉などのコリの改善
- 冷え性の改善

【使用方法等】

- 上半身・下半身に適したものを、衣類として直接肌に着用する。
- 本製品は休養時、運動後、睡眠時に着用可能である。
- 本製品は再使用可能である。
- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まるため、十分な水分補給を行う。

【使用上の注意】

- 着用中に身体に何らかの異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、ただちに使用を中止すること。
- 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。
- 本製品を洗濯する際は、洗濯絵表示に従って行うこと。
- 湿気や直射日光の影響や、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合があるので注意すること。
- 長時間水に浸したり、濡れたまま重ねておくと、単色部分や他のものに色移りする場合があるので注意すること。
- 漂白剤の使用は避けること。
- 乾燥機の使用は避けること。
- 鋭利なもの等でひっかけないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから湿気のない場所で保管すること。

【耐用年数】

2年

【取り扱い上の注意】

- 本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますのでご注意ください。

【包装】

1枚/箱

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ベネクス
〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4F
電話：046-200-9288

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。