

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。

医療機器届出番号：14B3X10040000002

医療用品04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 JMDNコード 71105001

ベネクス リカバリーウェアSD

【禁忌・禁止】

- 異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、使用を中止すること。
- 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

1. トップス 6570 スタンダードドライ+ ロングスリーブ クルーネック メンズ



size	M	L	XL	XXL
着丈	67cm	70cm	73cm	76cm
身幅	51cm	54cm	57cm	60cm
袖丈	81cm	83cm	85cm	87cm
袖口幅	9cm	9.5cm	10cm	10.5cm

2. ボトムス 6571 スタンダードドライ+ ジョガーパンツ メンズ



size	M	L	XL	XXL
ウエスト	74cm	80cm	86cm	92cm
わたり	29cm	31cm	33cm	35cm
裾口幅	13.5cm	14cm	14.5cm	15cm
総丈	96.6cm	99.6cm	102.6cm	105.6cm
股下	70cm	72cm	74cm	76cm

3. トップス 6580 スタンダードドライ+ ロングスリーブ クルーネック レディース




size	M	L	XL
着丈	57cm	59cm	61cm
身幅	53cm	55cm	57cm
袖丈	74cm	76cm	78cm
袖口幅	8.5cm	9cm	9.5cm

4. トップス 6581 スタンダードドライ+ ボートネック ロングスリーブ レディース




size	M	L	XL
着丈	67cm	69cm	71cm
身幅	48cm	50cm	52cm
袖丈	75cm	77cm	79cm
袖口幅	8.5cm	9cm	9.5cm

5. ボトムス 6582 スタンダードドライ+ ジョガーパンツ レディース

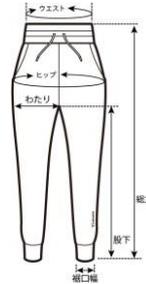

size	M	L	XL
ウエスト	67cm	71cm	75cm
ヒップ	106cm	112cm	118cm
わたり	33cm	35cm	37cm
裾口幅	12cm	12.5cm	13cm
総丈	100cm	103cm	106cm
股下	67cm	69cm	71cm

6. ボトムス 6583 スタンダードドライ+ フレアパンツ レディース

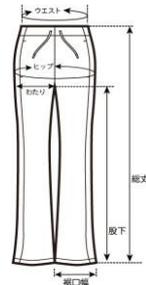

size	M	L	XL
ウエスト	67cm	71cm	75cm
ヒップ	95cm	101cm	107cm
わたり	30cm	32cm	34cm
裾口幅	26cm	27cm	28cm
総丈	93.4cm	96.4cm	99.4cm
股下	65cm	67cm	69cm

2. 原理

本商品の繊維に含まれるDPV576粒子が体温の遠赤外線を放射し、温熱治療を行う。

【使用目的又は効果】

本製品は疲労回復を目的として、休養時に着用可能である。

遠赤外線の血行促進効果により、次のような健康効能が期待できる。

- 疲労の回復・改善
- 血液循環の改善
- 新陳代謝の促進
- むくみの改善
- 肩・腰・筋肉などのコリの改善
- 冷え性の改善

【使用方法等】

- 上半身・下半身に適したものを、衣類として直接肌に着用する。
- 本製品は休養時、運動後、睡眠時に着用可能である。
- 本製品は再使用可能である。
- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まるため、十分な水分補給を行う。

【使用上の注意】

- 着用中に身体に何らかの異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、ただちに使用を中止すること。
- 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。
- 本製品を洗濯する際は、洗濯絵表示に従って行うこと。
- 湿気や直射日光の影響や、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合があるので注意すること。
- 長時間水に浸したり、濡れたまま重ねておくと、単色部分や他のものに色移りする場合があるので注意すること。
- 漂白剤の使用は避けること。
- 乾燥機の使用は避けること。
- 鋭利なもの等でひっかけないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから湿気のない場所で保管すること。

【耐用年数】

2年

【取り扱い上の注意】

- 本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますのでご注意ください。

【包装】

1枚/袋

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ベネクス
〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4F
電話：046-200-9288

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。