

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。

医療機器届出番号：14B3X10040000003

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 JMDN コード 71105001

ベネクス リカバリーウェア JS


【禁忌・禁止】

- 異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、使用を中止すること。
- 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

1. ボトムス 8115 リカバリームーヴウェア ジョガーパンツ メンズ

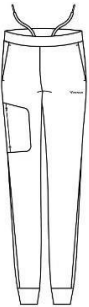

size	M	L	XL	XXL
身長	165-175cm	170-180cm	175-185cm	175-185cm
ウエスト	75-81cm	79-85cm	83-89cm	87-93cm

2. トップス 8116 リカバリームーヴウェア エンボスロゴ Tシャツ メンズ




size	M	L	XL	XXL
身長	165-175cm	170-180cm	175-185cm	175-185cm
胸囲	88-96cm	94-100cm	98-104cm	102-108cm

3. ボトムス 8117 リカバリームーヴウェア ハーフパンツ メンズ



size	M	L	XL	XXL
身長	165-175cm	170-180cm	175-185cm	175-185cm
ウエスト	75-81cm	79-85cm	83-89cm	87-93cm

4. ボトムス 8166 リカバリームーヴウェア ワイドパンツ レディース

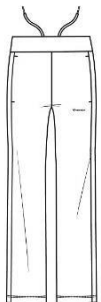


size	M	L
身長	154-164cm	159-169cm
ウエスト	61-67cm	66-72cm
ヒップ	87-95cm	92-100cm

5. トップス 8167 リカバリームーヴウェア ショートスリーブ レディース



size	M	L
身長	154-164cm	159-169cm
胸囲	80-87cm	86-93cm

6. ボトムス 8168 リカバリームーヴウェア ハーフパンツ レディース

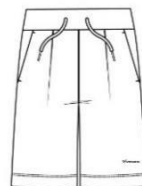

size	M	L
身長	154-164cm	159-169cm
ウエスト	61-67cm	66-72cm
ヒップ	87-95cm	92-100cm

2.原理

本商品の繊維に含まれる DPV576 粒子が体温の遠赤外線を輻射し、温熱治療を行う。

【使用目的又は効果】

本製品は疲労回復を目的として、休養時に着用可能である。
遠赤外線の血行促進効果により、次のような健康効能が期待できる。

- 疲労の回復・改善
- 血液循環の改善
- 新陳代謝の促進
- むくみの改善
- 肩・腰・筋肉などのコリの改善
- 冷え性の改善

【使用方法等】

- 上半身・下半身に適したものを、衣類として直接肌に着用する。
- 本製品は休養時、運動後、睡眠時に着用可能である。
- 本製品は再使用可能である。
- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まるため、十分な水分補給を行う。

【使用上の注意】

- 着用中に身体に何らかの異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、ただちに使用を中止すること。
- 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。
- 本製品を洗濯する際は、洗濯絵表示に従って行うこと。
- 湿気や直射日光の影響や、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合があるので注意すること。
- 長時間水に浸したり、濡れたまま重ねておくと、単色部分や他のものに色移りする場合があるので注意すること。
- 漂白剤の使用は避けること。
- 乾燥機の使用は避けること。
- 鋭利なもの等で引っかけないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから湿気のない場所で保管すること。

【耐用年数】

2 年

【取り扱い上の注意】

- 本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますのでご注意ください。

【包装】

1 枚/袋

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ベネクス

〒243-0018 神奈川県厚木市中町 4-4-13 浅岡ビル 4F

電話：046-200-9288

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。