

機械器具 56 採血又は輸血用器具
管理医療機器 単回使用採血用針 35209002

ニプロ採血針 (マルチタイプ)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 未滅菌の採血管と組み合わせて使用しないこと。
3. 採血終了後、採血管に採血針が刺さったままの状態で駆血帯を外さないこと。〔駆血帯を外すことによる圧力の変動により、採血管内の内容物等が患者の体内に逆流するおそれがある。〕
4. ホルダは患者ごとの使用とし、使用後は廃棄すること。〔ホルダに血液が付着した場合は、交差感染のおそれがあるため。〕

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は一本の両刀針（針管）、針基、ラバースリーブからなる採血針とそれを収納するプロテクタと保護キャップから構成されている。なお、本品はエチレンオキシドガス滅菌済みである。ラバースリーブは耐圧性能を有している。

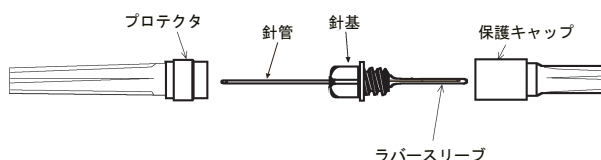

2. 材質

針管：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) プロテクタと保護キャップを両手で持ち、回転させて開封します。
- 2) 保護キャップを外して、針基を専用ホルダにねじ込みます。
- 3) 駆血帯をかけた後に、穿刺部位を消毒します。
- 4) 真っ直ぐ引いてプロテクタを外し、血管へ穿刺します。
- 5) 針管を血管に穿刺したら、採血管をホルダに真っ直ぐ完全に押し込みます。
- 6) 規定量の血液が採れるまで状態を保ちます。
- 7) 採血の血流が停止したら、直ちに採血管をホルダから外します。
- 8) 連続採血する場合には、ホルダを固定したまま採血管を取り替えます。
- 9) 採血終了後、採血管をホルダから抜き、駆血帯を外します。



- 10) 注意して針管を抜き、止血します。
- 11) 使用後のホルダは感染防止に注意し、そのまま廃棄します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. 保護キャップを外す際には、保護キャップをラバースリーブに接触させないように真っ直ぐ外してください。〔針管がラバースリーブ側面を貫通し、血液漏れのおそれがあります。〕
3. プロテクタを外すときは針先に当たらないように注意してください。〔針先変形のおそれがあります。針先が変形した場合は、本品を新しいものと交換してください。〕
4. リキャップしないでください。〔リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) ホルダはニプロ製ホルダを使用すること。〔ニプロ製ホルダを使用しなかった場合には、本品がホルダから抜け出る、又は本品が破損し血液漏れのおそれがある。〕
- 2) 血液漏れが発生した際は、針管を抜き、本品、ホルダ及び採血管を新しいものと交換すること。〔針先がラバースリーブの側面を貫通することで、ラバースリーブが正常に戻らず、血液漏れのおそれがある。〕
- 3) 体外循環回路、又は中心静脈から採血を行わないこと。〔圧力の変動により、採血管内の内容物等が患者の体内に逆流するおそれがある。〕
- 4) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ医工株式会社



針先注意
処置後の誤刺注意



ニプロ株式会社