

機械器具 48 注射筒
* 高度管理医療機器 インスリン皮下投与用針付注射筒 35389020

マイシヨット


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 造影剤等の高圧注入には使用しないこと。〔破損等の恐れがある。〕

【形状・構造及び原理等】

本品は外筒、押し子、ガスケット、針管及びプロテクターからなる。

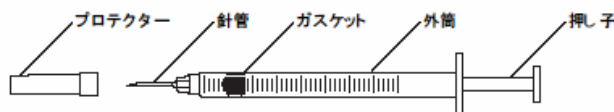

【使用目的、効能又は効果】

本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【操作方法又は使用方法等】

使用は1回限りとし、再使用はしないこと。

- *1. 本品の包装を開口部より開き、注射筒の方を持ち、包装から取り出します。滅菌されているのでそのまま使用できます。
- *2. 注射針がしっかり固定されていることを確認し、プロテクターを真直ぐ引いて外して下さい。

*＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1. 本品は針付きのため、誤って針を刺さないよう取り扱いには十分注意し、使用後は医師の指示に従って処分して下さい。
- 2. プロテクターを外すとき、針先がプロテクターに触れないよう注意して下さい。〔プロテクターが針に触れると刃先が変形し、穿刺しづらくなる場合があります。〕
- 3. 本品の針管部には直接手を触れないよう注意して下さい。
- *4. 注射針をバイアルのゴム栓に穿刺する場合は、なるべく刺通面に垂直に刺し、横方向に力を加えたり、同一部位に穿刺されることがないように注意して下さい。〔注射針の曲がりや破損、針管の詰まり、容器内へのゴム片混入が生じる場合があります。〕
- 5. 薬液容器壁面に注射針が当たらないよう注意して下さい。〔刃先が変形し、穿刺しづらくなる場合があります。〕
- 6. プロテクターをかぶせる際には、誤刺及びプロテクターからの針の飛び出しに注意して慎重に行って下さい。
- *7. 本品に強い力を加えないよう注意して下さい。〔破損する可能性があります。〕
- *8. 液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1. 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- *2. 使用するにあたって、目的とする製品であることを確認すること。
- *3. 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
- *4. 使用中は本品の破損、緩み、空気混入、薬液漏れ及び詰まり等について、十分注意すること。
- *5. 押し子はまっすぐ引くこと。〔斜めに引くと、ガスケットと外筒

との密着性が悪くなり、液漏れや空気混入又はガスケットの外れが生じる可能性がある。〕

- *6. 外筒印刷部の目盛を越えて押し子を引かないこと。〔押し子が外筒から抜けて液漏れ、空気混入が生じる可能性がある。〕
- *7. ガスケットに針等で傷をつけないこと。〔破損が生じ、液漏れや空気混入及び摺動抵抗の増加が生じる可能性がある。〕
- *8. 本品を鉗子等でつまんで傷をつけないように、さらに、はさみ等の鋭利なもので傷をつけないように注意すること。〔液漏れ、空気混入や破損が生じる可能性がある。〕
- *9. 外筒部を強く握る等、圧迫するような負荷を加えないこと。〔圧迫によりガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れや空気混入が生じる可能性がある。〕
- *10. 外筒印刷部をこすったり、あるいは薬液がついた状態で放置しないこと。〔目盛等の印刷部が消える可能性がある。〕
- *11. 薬液を針管に長時間接触させないこと。〔薬液が結晶化し、針管に詰まる可能性がある。〕
- *12. 運搬・操作時には、振動や衝撃に注意すること。
- 13. 低温下の衝撃で破損する危険があるため、低温時の取り扱いに注意すること。
- *14. 接液部を汚染させないこと。
- *15. 使用期限の過ぎたものは使用しないこと。
- 16. 携帯時に曲げ等の負担がかかるとプロテクターが外れることがあるので、取り扱いには十分注意すること。
- 17. 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間・使用の期限

外箱の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

【包装】

100、140本／箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ株式会社



ニプロ株式会社