



\*CP010602\*

【CP-01】

\*\* 2016 年 9 月 (第 7 版) (新記載要領に基づく改訂)  
\* 2012 年 11 月 (第 6 版)

医療機器承認番号: 15800BZY00394000

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
管理医療機器 単回使用汎用吸引チップ (JMDN コード: 35917102)

## ヤンカーサクション

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

##### ＜使用方法＞

1. 再使用禁止。
- \*\* 2. 再滅菌禁止。


#### 【形状・構造及び原理等】

##### \*\* ＜概要＞


本品は創傷部又は口腔の体液排出させる吸引管である。

##### ＜形状＞

##### 1. 吸引器具本体

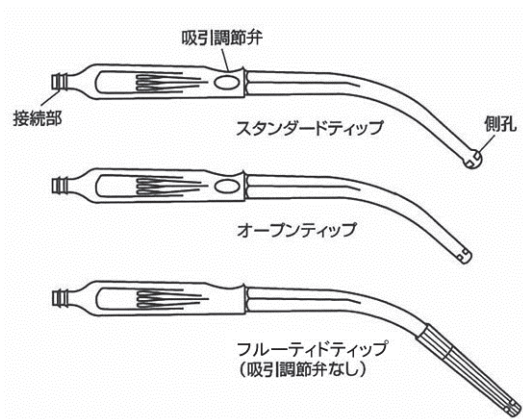

##### \*\* 2. チューブ

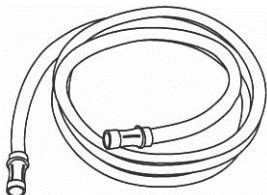

| カタログ番号 | ティップ形状     | 規格            |
|--------|------------|---------------|
| 3498   | オープンティップ   | 調節弁付          |
| 3488   | スタンダードティップ | 調節弁付          |
| 3447   | フルーティドティップ | 調節弁なし         |
| 3496   | スタンダードティップ | 調節弁付<br>チューブ付 |

##### ＜組成＞

| 名称       | 材質                                 |
|----------|------------------------------------|
| **吸引器具本体 | ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート               |
| **チューブ   | **ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）を含む） |

#### 【使用方法等】

##### \*\* ＜使用方法＞

1. 本品は滅菌済みの製品である。開封し、無菌操作法を用いて取り出すこと。
2. コネクティングチューブを用いて本品を吸引装置に接続する。
3. 体液および洗浄液を吸引する。
4. 必要に応じて吸引調節弁を指で押さえることによって、吸引圧の調節を行うことができる。

##### ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- \*\* 1. コネクティングチューブ付きの製品を使用する場合は、本製品とコネクティングチューブ、吸引装置のそれぞれの接続に緩みがないことを確認すること。
- 2. コネクティングチューブは閉塞しないよう、過度に折り曲げたり踏みつけるなどしないこと。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- \*\* (1) 本品はポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので注意すること。

#### 【保管方法及び使用期間等】

##### \*\* 1. 保管上の注意

- (1) 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて常温で保管すること。
- (2) 保管環境  
温度 10～32℃

##### \*\* ＜有効期間＞

5 年間〔自己認証（当社データ）による〕  
本品のラベルの使用期限を参照すること。

#### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### 製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

\*\* 電話番号: 06-6222-6606

##### 製造元

コンメド社(アメリカ合衆国)

CONMED Corporation