



* CP040502 *

【CP-04】

** 2016 年 9 月 (第 6 版) (新記載要領に基づく改訂)

* 2012 年 11 月 (第 5 版)

医療機器承認番号: 15800BZY00664000

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 単回使用汎用吸引チップ (JMDN コード: 35917102)

シグモイドスコープサクション

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞


1. 再使用禁止。
- ** 2. 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

** ＜概要＞

本品は、直腸検査に先立つ糞便吸引を目的とするものである。

＜形状＞

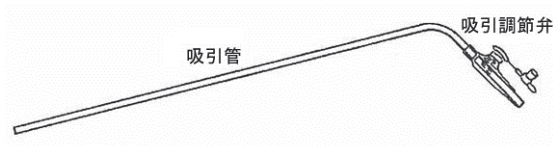

＜組成＞

ポリ塩化ビニル (可塑剤: フタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含む)

【使用方法等】

** ＜使用方法＞

1. 本品は滅菌済みの製品である。開封し、無菌操作法を用いて取り出すこと。
2. コネクティングチューブを用いて本品を吸引装置に接続する。
3. 腸内から糞便を吸引する。
4. 必要に応じて吸引調節弁を開閉することによって、吸引圧を調節する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
(1) 本品はポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

** 1. 保管上の注意

- (1) 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて常温で保管すること。
- (2) 保管環境
温度 10～32℃

** ＜有効期間＞

5 年間 [自己認証 (当社データ) による]
本品のラベルの使用期限を参照すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

** 電話番号: 06-6222-6606

製造元

コンメド社 (アメリカ合衆国)

CONMED Corporation