

## メディカット ガイド ワイヤー

### 再使用禁止


#### 【警告】※

挿入具を介してガイドワイヤー挿入後、抵抗が強く容易に抜去できないときは、ガイドワイヤーを無理に引っ張らず、挿入具とともに抜去すること。[本品を無理に引っ張ると破損したり、先端が切れて血管内に残るおそれがあるため。] ※

#### 【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止
- 2.再滅菌禁止※
- 3.ガイドワイヤー先端の形状を変えないこと。[ガイドワイヤーの損傷や破断の原因になることがあるため。]
- 4.ガイドワイヤーを右心室に挿入しないこと。[不整脈や心タンポナーデ等が発生させるおそれがあるため。] ※

#### 【形状・構造及び原理等】※

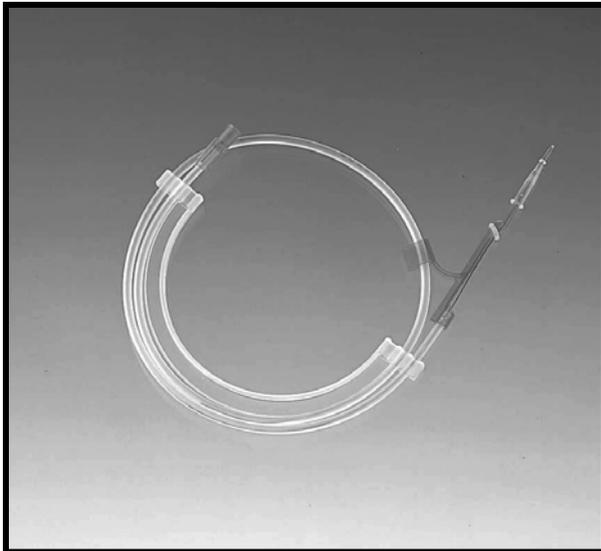

本品は血管内診断あるいは処置用カテーテルの挿入に使用するコアがステンレス鋼製のガイドワイヤーである。同梱されている製品は直接の包装に記載している。

〈種類〉

タイプ	カタログ番号	外径:mm(インチ)※※	長さ(cm)
J型	1-JFC45-18	0.46(0.018)	45
	1-JFC60-18		60
アングル型	1-AFC45-18	0.46(0.018)	45
	1-AFC60-18		60

〈原材料〉※

ガイドワイヤー：ステンレス


#### 【使用目的、効能又は効果】※

滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。 ※

#### 【操作方法又は使用方法等】

- 1.ヘパリン加生理食塩液入りシリンジをハブよりフラッシュし、保護用シース（以下、ディスペンサー）内に満たす。 ※
- 2.親指で、下図の位置にゴムリングを押し上げる。

図 1

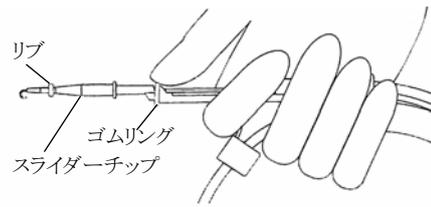

- 3.ガイドワイヤー先端が保護用スリーブ（以下、スライダーチップ）内にあることを確認する。 ※
- 4.スライダーチップ先端をプラスチックカニューレ又は金属針に入れてガイドワイヤーを挿入する。  
なお、ガイドワイヤーを金属針に挿入する際、スライダーチップをしっかり押し込み、ガイドワイヤーがブレないように挿入する。また、ガイドワイヤーがU字を描いていないか、目的の位置にあるかをX線撮影により確認する。

〈注意〉ガイドワイヤーの挿入はコイル状になっている側から行い、反対側のストレート端から挿入しないこと。

〈注意〉ガイドワイヤーを挿入する際に抵抗を感じたら、無理せず抜去すること。 ※

#### 【使用上の注意】

##### 1.重要な基本的注意

- 本品は滅菌済み単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。 ※
- 包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
- 包装を開封したら、速やかに使用すること。

##### 2.有害事象

本品の操作中に以下の有害事象があらわれることがあるので、異常が認められたら、直ちに適切な処置をすること。

##### 重大な有害事象

空気塞栓、血管内壁裂傷、血腫、血管穿孔

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

### 1. 貯蔵・保管方法

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

### 2. 有効期間・使用の期限

包装に使用期限を記載している。使用期限を過ぎたものは、使用しないこと。

## 【包装】

5本入り／箱

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及

### び住所等】※

製造販売元

日本シャーウッド株式会社

〒437-0004 静岡県袋井市友永1217の1

お問い合わせ先：03-5717-1613\*\*\*

製造元\*\*\*

日本シャーウッド株式会社