

器O6呼吸補助器
管理医療機器 酸素投与キット12855000

「エマジンオキシゲンシステム」の付属品
中濃度用酸素マスク No.4-1 成人用 チューブ付 /
中濃度用酸素マスク No.4-01 成人用 チューブなし /
中濃度用酸素マスク No.4-2 子供・小児用 チューブ付

再使用禁止

TP-214

* 【警告】

- ・火気に近づけないでください。
- ・本器（ヘッドバンド）には天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。
- ・天然ゴムと接触する機会が多い人は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。

【使用方法】

- ・本品は感染予防のため一患者専用として使用してください。
- ・酸素マスク本体からの酸素流出を確認し、患者に装着してください。
- ・ヘッドバンドの締め付け（圧迫）による皮膚損傷の発生に注意してください。


* 【禁忌・禁止】

- ・本器は再使用しないでください。
- ・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用、及び患者へ使用しないでください。


* 【形状・構造及び原理等】

形状・構造


[1]

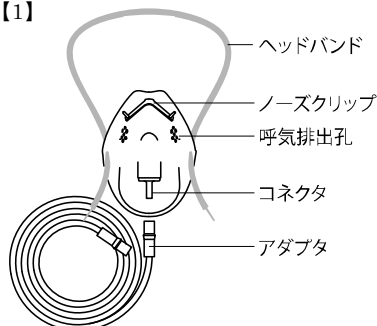

[2]

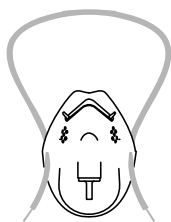

[3]

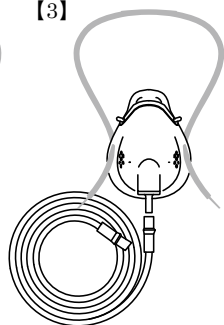

- [1] (中濃度用酸素マスク No.4-1 成人用 チューブ付)
- [2] (中濃度用酸素マスク No.4-01 成人用 チューブなし)
- [3] (中濃度用酸素マスク No.4-2 子供・小児用 チューブ付)

組成

ポリ塩化ビニール

※可塑剤としてフタル酸ジ2-エチルヘキシル/フタル酸ジイソノールを使用しております。

* 【使用目的又は効果】

本器は、酸素吸入器の付属品として自発呼吸の患者の吸入に鼻と口を覆い、比較的中濃度の酸素を加えることにより、酸素濃度を上昇させる為の酸素吸入療法時に使用される。

* 【使用方法等】

- 1) アダプタをコネクタに接続してください。
- 2) もう一方のアダプタを酸素吸入器に接続してください。
- 3) 必要な酸素量を酸素吸入器にて調節してください。
- 4) 酸素マスクを顔面にあて、ヘッドバンドを後頭部に掛けてください。
- 5) ヘッドバンドの両端を引っ張り、酸素マスクを固定してください。
- 6) ノーズクリップを調整し、漏れを防いでください。
※チューブなしの仕様は酸素チューブを準備してください。

【使用上の注意】

構成品等を接続する場合は、その互換性、安全性を確認した上で使用してください。

* 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

有効期間

2年（自己認証による）

* * * 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社
TEL: 049-243-9939
www.bluecross-e.co.jp

販売業者（販売店）