

器O6呼吸補助器  
管理医療機器 酸素投与キット12855000

## 「エマジンオキシゲンシステム」の付属品 酸素カニューラ No.6-1 S 成人用 チューブ付

### 再使用禁止

TP-225

#### \*【警告】

- ・火気に近づけないでください。
- 【使用方法】
- ・本器は感染予防のため一患者専用として使用してください。
  - ・酸素カニューラ本体からの酸素流出を確認し、患者に装着してください。
  - ・連結チューブの締め付け（圧迫）によるカニューラ、連結チューブ接触部の皮膚損傷の発生に注意してください。

TEL：03-3815-2220


販売業者（販売店）

#### \*【禁忌・禁止】

- ・本器は再使用しないでください。

#### \*【形状・構造及び原理等】

##### 形状・構造

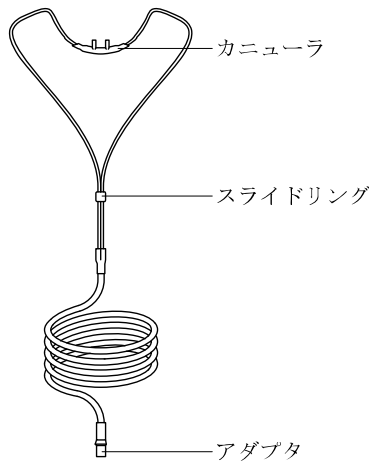

##### 組成

ポリ塩化ビニール

※可塑剤としてフタル酸ジ2-エチルヘキシル/フタル酸ジイソノールを使用しております。

#### \*【使用目的又は効果】

本器は、酸素吸入器の付属品として自発呼吸の患者の吸入に鼻孔を通して酸素を加えることにより、酸素濃度を上昇させる為の酸素吸入療法時に使用される。

#### \*【使用方法等】

- 1) アダプタを酸素吸入器に接続してください。
- 2) 必要な酸素量を酸素吸入器にて調節してください。
- 3) 酸素カニューラの先端を鼻孔に挿入してください。
- 4) 連結チューブを両耳にかけ、顎下へ移動してください。
- 5) スライドリングを調整し、酸素カニューラを固定してください。

#### \*【使用上の注意】

互換性、安全性を確認した上で接続してください。

#### \*【保管方法及び有効期間等】

##### 保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

##### 有効期間

2年（自己認証による）

#### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社  
埼玉県川越市かし野台2丁目2番地4  
TEL：049-243-9939

お問い合わせ先：株式会社ブルークロス・エマージェンシー  
東京都文京区本郷3丁目43番16号