

器 O 6呼吸補助器
管理医療機器 酸素投与キット 12855000

「エマジンオキシゲンシステム」の付属品 酸素チューブ No. 7-1 直型 アダプター付

再使用禁止

TP-217

* 【警告】


- ・火気に近づけないでください。
- ・廃棄の際は医療廃棄物として専門業者へ処理を依頼してください。
[使用方法]
- ・本器は感染予防のため一患者専用として使用してください。

* 【禁忌・禁止】

- ・再使用はしないでください。
[併用医療機器]
- ・気管チューブ、気管切開チューブとは接続しないでください。

* 【形状・構造及び原理等】

形状・構造

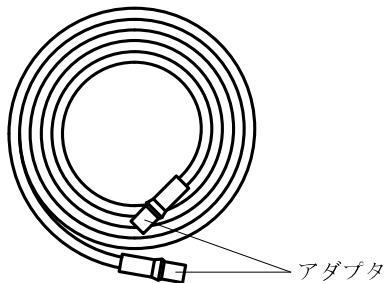

組成

ポリ塩化ビニール

※可塑剤としてフタル酸ジ 2-エチルヘキシル/フタル酸ジイソノ
ニルを使用しております。

* 【使用目的又は効果】

本器は、酸素吸入器の付属品として酸素マスク又は他のコネクタ又は酸素供給源の接続に使用される。

* 【使用方法等】

- 1) アダプターを酸素吸入器に接続してください。
- 2) もう一方のアダプターを酸素マスク又は他のコネクタに接続してください。
- 3) 必要な酸素量を酸素吸入器にて調節してください。

* 【使用上の注意】

互換性、安全性を確認した上で接続してください。

* 【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

有効期間

2年 (自己認証による)

* * * 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社

TEL : 049-243-9939

www.bluecross-e.co.jp

販売業者 (販売店)