

** 2024 年 1 月改訂（第 7 版）
* 2018 年 2 月改訂（第 6 版）

届出番号：17B2X10001000006

機械器具（64）歯科用探針
一般医療機器 歯周ポケットプローブ JMDN コード：31848000

プローブ KR

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り

〔ステンレスチップ〕



タイプ	深度スケール (mm)
CP11	3-6-8-11
CP12	3-6-9-12
W. H. O	3.5-5.5-8.5-11.5
CP15	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15



タイプ	深度スケール (mm)
スリムライト	3-6-9-12

〔チタンチップ〕



タイプ	深度スケール (mm)
CP11	3-6-8-11
CP12	3-6-9-12
CP15	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

2. 原材料

〔ステンレスチップ〕

ハンドル部：ステンレススチール

作業部：ステンレススチール

〔チタンチップ〕

ハンドル部：ステンレススチール

作業部：チタニウム（窒化ジルコニウムコーティング）

3. 包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定する。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうかを確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守）
- 2) 本品の先端部を歯周ポケット部に挿入し、歯肉辺縁あるいはセメント-エナメル境界からポケット底までの深度をプローブ先端部の目盛りによって読み取る。ポケット深度は、1 本の歯でも一定でないため、通常、1 本の歯の周囲 4～6 点を測定し、記録する。

**【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。
- 3) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 4) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2) 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

- ・ 使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）

〔滅菌〕

- ・ オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

- ・ 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

- ・ 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

- ・ 塩素系消毒剤は使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH&Co. KG

（コーデント ローランド コーラー メディツィンテック社）

製造国：ドイツ