

エクスプローラーAA

*【禁忌・禁止】

- 1) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 2) 器具の形態変更や改造などはしないこと。

**【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り
[片頭]

#3

全長: 155mm



#3A サンドハンドル

全長: 155mm



#3A ラウンドハンドル

全長: 155mm



#9

全長: 155mm



#マルチ

全長: 155mm



#23 サンドハンドル

全長: 155mm



#23 ラウンドハンドル

全長: 150mm



#17 ラウンドハンドル

全長: 155mm



[両頭]

#3-9 丸柄

全長: 178mm



#3-9 六角柄

全長: 178mm



#17/23

全長: 170mm



2. 原材料
ステンレススチール

3. 包装
1 本 / 包

【使用目的又は効果】

歯科診療で触診等に用いる手持型の器具（プローブ）をいう。
軸の先端の細い作業部分は用途に応じて針状又は鉤型のもの、
又は鈍的形状のものがある。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守)
- 2) 本品の先端部を使って、歯石の探査や修復部の探査を行う。

*【使用上の注意】

- 1) 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体十分に清掃し滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

4) 洗浄・滅菌上の注意

〔洗浄〕

- ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

〔滅菌〕

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。（オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守）
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号: 076-278-8800

製造業者: Adam's Aid Corporation
(アダムスエイド社)

製造国: パキスタン