

デンタルスパチュラ A A

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

[印象材用]



[石膏用]



[ラバー用]



[多目的用]



2. 原材料

柄: 木、ステンレススチール(多目的用のみ)
作業部: ステンレススチール

3. 包装

1本 / 包

【使用目的又は効果】

印象材、石膏等の練和に使用する。

【使用方法等】

印象材、石膏等の練和を行う。

【使用上の注意】

1. 使用する前に本品が消毒または滅菌済みかどうか確認すること。「柄が木製の場合はオートクレーブ滅菌不可。アルコール消毒液を含ませた柔らかい布等で清拭すること。柄がステンレススチール製の場合はオートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守。」
2. 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食する(錆びる)ことがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらが確認された場合は、使用を中止すること。
2. 洗浄・消毒・滅菌について

[洗浄]

- ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

[消毒(柄が木製のもの)]

- ・使用前使用後は、アルコール消毒液を含ませた柔らかい布等で表面を拭き取り、消毒すること。
- ・持ち手部分が木製である為、オートクレーブ等の高温を伴う処理は行わないこと。

[滅菌(柄がステンレススチール製のもの)]

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、135℃以下厳守。】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する(錆びる)ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号: 076-278-8800

製造業者: Adam's Aid Corporation
(アダムスエイド社)

製造国: パキスタン