


## オルセンヘーガーAA

### 【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### \*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り  
S.S

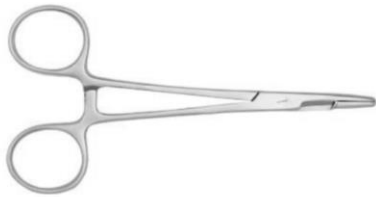

| 型名   |
|------|
| #140 |
| #165 |

T.C.



| 型名          |
|-------------|
| T.C. / #140 |
| T.C. / #165 |

2. 原材料  
ステンレススチール及びタングステン加工

3. 包装  
1 本 / 包

### 【使用目的又は効果】

縫合時に縫合針を把持し、縫合糸等の切断を行う。

### 【使用方法等】

#### 〔使用方法〕

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守）
- 2) 先端部で縫合針を把持し、ハサミの部分で切断する。ロック部を必要に応じて使用する事で先端部の把持が継続される。

### \*【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によって腐食（錆び）することがある。
- 4) 洗浄・滅菌上の注意  
〔洗浄〕
  - ・使用後は防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
  - ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
  - ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
  - ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）〔滅菌〕
  - ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 135℃以下厳守】
  - ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。〔その他〕
  - ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
  - ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な乾燥した場所にて保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：株式会社 歯愛メディカル  
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1  
電話番号：076-278-8800

製造業者：Adam's Aid Corporation  
（アダムスエイド社）  
製造国：パキスタン