

機械器具(36)医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット JMDNコード: 35079001

ピンセットAA

【禁忌・禁止】

- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
下記の通り

タイプ	全長	
アドソングレーフェ	120mm	
刺抜きピンセット	130mm	
外科ピンセット	133mm(無鉤)、132mm(有鉤)、 150mm、180mm、230mm	
無鉤		
有鉤		
耳用ピンセット	140mm	
鼻用ピンセット	170mm	
デュペーキーピンセット無鉤 ロングタイプ	305mm	
外科ピンセット無鉤	130mm	
外科用ピンセット(ピン付)	130mm	
技工用ピンセット	直	165mm
	曲	162mm
カレッジピンセット(ブラック)	155mm	

2. 原材料

ステンレススチール

- カレッジピンセット(ブラック): ステンレススチール
(チタコーティング)
- 技工用ピンセット ハンドル部: バルカンファイバー

3. 包装

1本/包

【使用目的又は効果】

手術用、処置用、又は技工物に使用するピンセット。

*【使用方法等】

[使用方法]

- 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
(滅菌温度は下記のとおり)

[滅菌条件]

タイプ	オートクレーブ温度
アドソングレーフェ	乾燥工程を含む 134℃以下
刺抜きピンセット	
外科ピンセット 無鉤/有鉤	
耳用ピンセット	
鼻用ピンセット	
デュペーキーピンセット無鉤 ロングタイプ	
外科ピンセット無鉤	
外科用ピンセット(ピン付)	
技工用ピンセット	オートクレーブ滅菌不可
カレッジピンセット	乾燥工程を含む 121℃以下

- ハンドル部を開閉し、組織、技工物等を把持する。

*【使用上の注意】

- 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。(技工用ピンセットは滅菌不可。)
- 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。

4) 洗浄・滅菌について

[洗浄]

- 使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。(必要に応じて潤滑油を塗布すること。)

[滅菌]

- オートクレーブ等で滅菌を行うこと。(オートクレーブ温度は【使用方法】に記載した[滅菌条件]に従って行うこと。)
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する(錆びる)ことがある。
- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。
- 塩素系消毒剤は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号: 076-278-8800

製造業者: Adam's Aid Corporation
(アダムスエイド社)
製造国: パキスタン