

コンポジット充填器 A A

【禁忌・禁止】

1. 本品はニッケル及びクロムを含有するため、これらの成分に対し湿疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

外観写真は以下のとおり。

代表例: ブラックコーティング



タイプ
チタンコーティング
ポリッシュチップ&ハンドル
ホローハンドル
ホローハンドル(ブルーチタンコーティング)
ブラックコーティング
ゴールドチップ

2. 原材料

ステンレススチール、チタン加工

3. 包装

1本 / 包

【使用目的又は効果】

コンポジットレジンを歯牙に充填、塗布するため等に用いる。

**【使用方法等】

1. 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
オートクレーブ滅菌可。条件は下記の通り。
チタンコーティング、ブルーチタンコーティング: 131°C
ブラックコーティング: 121°C
上記を除いた製品: 134°C
2. コンポジットレジン充填時の圧接及び形成等に、その形に合った充填器で充填を行う。

【使用上の注意】

1. 本品はニッケルとクロムが含まれるため、ごく少数ではあるがこれらの成分に対してアレルギー反応を起こす場合がある。アレルギー反応が生じた場合は、患者へ医師の診断を受けるよう指示すること。
2. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
3. 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
5. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によって腐食(錆び)することがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所にて保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】

1. 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2. 洗浄、滅菌について

〔洗浄〕

使用後は防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ワールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。(必要に応じて潤滑油を塗布すること。)

〔滅菌〕

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。オートクレーブ温度は【使用方法】の記載に従うこと。

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する(錆びる)ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆びや変色の原因となる可能性がある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル

住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号: 076-278-8800

製造業者: Adam's Aid Corporation (アダムスイド社)

製造国: パキスタン